



alter ^{eco}
sant ^e

Turnplayte / Septembre 2009


Disque Turnplayte

Le disque pivotant Turnplayte est un disque pivotant en plastique, ultra-plat, muni d'un antidérapant.

SIECA611380 (Diamètre : 38 cm)



9, boulevard de Maurens / 31270 Cugnaux
Tél. : 05 34 46 03 76 / Fax. : 05 34 46 13 65
contact@alterecosante.net/ www.alterecosante.net

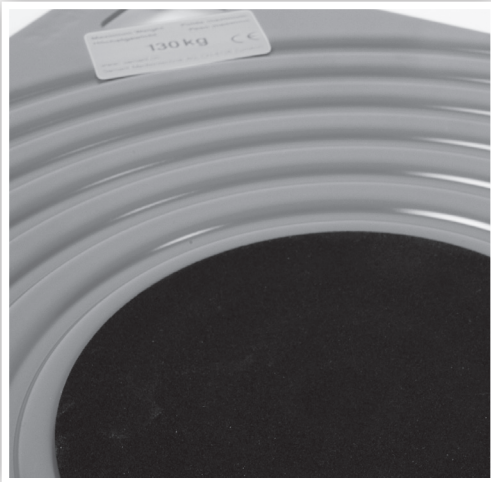

Avant toute utilisation, lire attentivement les conseils de manipulation et de prudence ci-après. Ces conseils vous permettront d'utiliser au mieux votre disque pivotant Turnplayte.

	<ol style="list-style-type: none"> 1 Placer le disque Turnplayte sur le sol. 2 Amener le buste et le bassin du patient vers soi. 3 Faire pivoter dans le sens voulu.
	<p>Après utilisation, le disque TURNPLAYTE ne doit pas rester sur le sol.</p>
	<p>Pour la pratique de ce type de transfert, il peut être très utile d'associer, selon le cas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • une sangle de transfert (Haussière, Olivia, Gériamax, Ischio-Max) ; • une planche de transfert.
	<p>Déclaration CE de conformité. Le disque pivotant Turnplayte (Réf. : SIECA611380) est répertorié dans les produits dits de « classe 1 » selon la directive européenne 93/42.</p>

Disque TURNPLAYTE

■ Principe général

Le Turnplayte est un disque tournant à faible coefficient de friction, posé au sol durant un transfert debout. Les surfaces externes prévues pour un usage intensif sont antidérapantes.

■ Conseils d'utilisation

En utilisant les techniques courantes de manutention, de nombreux patients peuvent ainsi participer pour se lever et se transférer.

- Pour un transfert assisté, évaluer si l'usage de ce produit est adapté au patient.
- En zone humide, vérifier l'adhérence.

■ Mise en place

- Placer le disque sur le sol dans une position intermédiaire aux 2 plans de transfert.
- Un pied soignant positionné au centre du disque, amener le buste et le bassin du patient vers soi.
- À l'aide du pied, faire pivoter dans le sens voulu.

■ Hygiène et entretien

Le procédé de nettoyage suivant doit être utilisé :

- Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant :
 - essuyage léger avec un papier non tissé ;
 - séchage à l'air.

Tous les produits de notre gamme se conforment aux protocoles de désinfection hospitalière. Protocole de « nettoyage – désinfection et de compatibilité tissus » mis au point par la société ANIOS.

Produit recommandé : ANIOS détergent désinfectant surfaces hautes.

