



Fiche **TECHNIQUE**

alter ^{co}
sant ^e

L'échelle **Anoli**

Anoli / Septembre 2009

Constituée de trois anneaux, cette échelle de lit permet de se redresser seul au lit.

SIANOLI DIM 200cm

FABRIQUÉ EN FRANCE



9, boulevard de Maurens / 31270 Cugnaux
Tél. : 05 34 46 03 76 / Fax. : 05 34 46 13 65
contact@alterecosante.net/ www.alterecosante.net





**Avant toute utilisation, lire attentivement les conseils de manipulation et de prudence ci-après.
Ces conseils vous permettront d'utiliser au mieux votre échelle Anoli.**

	<p>1 Fixer l'Anoli au pied du lit, 2 Positionner les anneaux vers la tête de lit, 3 Tracter sur les anneaux.</p>
	<p>!! Attention !! Prendre garde à ne pas laisser tomber l'Anoli au sol.</p>
	<p>??</p>
	<p>Déclaration CE de conformité. L'Echelle ANOLI (réf. : SIANOLI) est répertoriée dans les produits dits de « classe1 » selon la directive européenne 93/42.</p>

L'échelle ANOLI

■ Principe général

L'échelle Anoli est conçue pour permettre à une personne alitée d'utiliser les anneaux pour se relever plus facilement.

■ Conseils d'utilisation

- Fixer l'échelle Anoli au pied du lit grâce à la boucle nylon,
- Les anneaux sont en direction de la tête de lit,
- Saisir les anneaux avec les mains,
- Tracter en direction du pied de lit.

Recommandée pour :

Les myopathies de ceinture et les patients alités.

■ Hygiène et entretien

Le procédé de lavage suivant doit être utilisé :

- Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant,
- Essuyage léger avec papier non tissé,
- Séchage à l'air.

Tous les produits de notre gamme se conforment aux protocoles de désinfection hospitalière. Protocole de « nettoyage – désinfection et de compatibilité tissus » mis au point par la société ANIOS.

Produit recommandé : ANIOS détergent désinfectant surfaces hautes.

