

■ Montage

- Poser la plaque à plat sur le sol.
- Enfiler le mât dans la plaque et, à l'aide d'une clé de 13, visser les deux boulons.
- Enfiler la barre d'appui sur le mât et ajuster la molette à hauteur voulue. Serrer la molette.

L'Automax® peut être livré avec un appui tibial, une sangle fessière et une tablette amovible.

■ Hygiène et entretien

Tous les produits de notre gamme se conforment aux protocoles de désinfection hospitalière. Protocole de « nettoyage – désinfection et de compatibilité tissus » mis au point par la société ANIOS.

Produits prohibés : solvants, bases, acides, eau de javel, poudres et produits abrasifs.

Produit recommandé : ANIOS détergent désinfectant surfaces hautes.

Le guidon Automax® est protégé auprès de l'INPI.

Toute modification technique est interdite sans l'accord écrit du fabricant qui dans ce cas dégage totalement sa responsabilité.

FABRIQUÉ EN FRANCE



9, boulevard de Maurens / 31270 Cugnaux
Tél. : 05 34 46 03 76 / Fax. : 05 34 46 13 65
contact@alterecosante.net/ www.alterecosante.net



alter eco
santé


Automax® / Septembre 2009

Guidon Automax®

Le guidon Automax® est une plate-forme avec une barre d'appui permettant le transfert autonome sans l'aide d'une tierce personne. Il est particulièrement adapté pour des patients :

- nécessitant un point d'appui pour les transferts ;
- présentant une régression psychomotrice ;
- hémiplegiques ;
- en rééducation.

SIGUIDA (Poids : 21 kg)

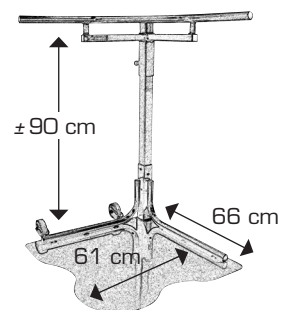



Avant toute utilisation, lire attentivement les conseils de manipulation et de prudence ci-après. Ces conseils vous permettront d'utiliser au mieux votre guidon Automax®.

	<ol style="list-style-type: none"> 1 Poser les pieds sur la plaque, saisir la barre d'appui, se pencher en avant. 2 En fléchissant les membres supérieurs, tirer ou appuyer sur la barre et se verticaliser. 3 En appui sur la barre, passer d'un pied sur l'autre pour pivoter.
	<p>Ne jamais déplacer le Guidon Automax® avec une personne dessus. Ne jamais s'asseoir sur la barre d'appui du guidon. Utiliser avec des chaussures non glissantes ou pieds nus.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • La verticalisation du patient est favorisée si son hauteur d'assise est supérieure à celle des genoux. • Dans certains cas, on adjoint un disque de transfert Pédilette. • En rééducation, on le positionne en bout de la rampe de marche.
	<p>Déclaration CE de conformité. Le guidon Automax® (Réf. : SIGUIDA) est répertorié dans les produits dits de « classe 1 » selon la directive européenne 93/42.</p>

Guidon AUTOMAX®

■ Principe général

La plate forme Automax® permet le transfert autonome sans l'aide d'une tierce personne. Elle est équipée de deux roulettes **pour le déplacement à vide**. La barre d'appui est réglable en hauteur. Dans certains cas ou en phase d'apprentissage, il est nécessaire qu'une tierce personne reste vigilante aux risques de perte d'équilibre.

■ Conseils d'utilisation

Positionnement du guidon

- Un sol régulier pour un bon appui et aucun obstacle dans le périmètre.
- Bonne distance appareil – assise.
- Aux WC, une des deux encoches semi-circulaires de la base doit épouser la colonne de la cuvette.

■ Utilisation du guidon

- S'assurer que les roues du lit ou du fauteuil sont bloquées.
- S'asseoir sur le bord du lit, du fauteuil, des WC, ou du fauteuil roulant (enlever les repose pieds pouvant gêner).
- Poser les pieds sur la plaque et se pencher en avant.
- Veiller à respecter le schéma moteur naturel ; pointes des pieds en retrait par rapport aux genoux.
- Saisir la barre du guidon avec les mains, pouces vers le bas.
- En fléchissant les membres supérieurs, tirer ou appuyer sur la barre et se verticaliser.
- En appui sur la barre, passer d'un pied sur l'autre et pivoter pour effectuer un quart de tour afin de s'asseoir sur l'assise d'arrivée.

■ Déplacement du guidon à vide

Les deux roulettes prennent appui au sol par une simple inclinaison du guidon sur le coté de celles-ci.

