

Hygiène et entretien

Le procédé de nettoyage suivant doit être utilisé :

- Essuyage avec un produit légèrement alcoolisé de la partie métallique.
- Selon modèle :
 - sangle velcro, lavable à 30° ;
 - sangle tissu lavable à 60°, séchage à 60°.

FABRIQUÉ EN FRANCE



9, boulevard de Maurens / 31270 Cugnaux
Tél. : 05 34 46 03 76 / Fax. : 05 34 46 13 65
contact@alterecosante.net/ www.alterecosante.net



alter éco
santé

Canoli® / Septembre 2009

Barre latérale Canoli®


La barre latérale universelle de redressement permet le passage de la position allongée à la position assise au bord du lit, en respectant un schéma moteur naturel. Adaptable sur tous types de lit, elle est livrée avec deux sangles de fixation.

- DEBARLI90
 - DEBARLI140
 - DEBARXXL
 - DECLIBAR90
 - DECLIBAR140
- (80 cm x 40 cm x 32 cm – Poids : 2,2 kg)

- DEBARLIDOU
 - DEBARCLIDOU
- (93 cm* x 42 cm x 34 cm – Poids : 2,2 kg)

- DEHAUBAR90
- (80 cm x 40 cm x 45 cm – Poids : 2,2 kg)

* largeur modulaire

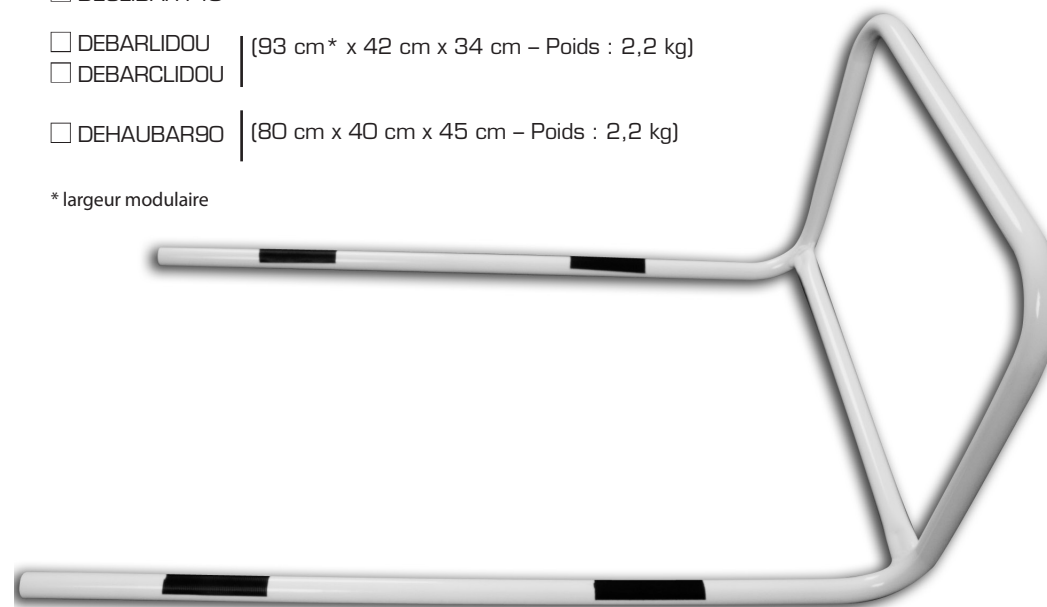



Avant toute utilisation, lire attentivement les conseils de manipulation et de prudence ci-après. Ces conseils vous permettront d'utiliser au mieux votre barre latérale de redressement.

	<ol style="list-style-type: none"> 1 Saisir la barre de lit avec la main opposée. 2 Tracter sur la barre, faire pivoter les jambes vers l'extérieur. 3 Pousser sur la barre pour s'asseoir.
	<p>Lit médicalisé : les sangles doivent enserrer le relève buste sans empêcher les fonctionnalités de ce dernier.</p>
	<p>Pour la rééducation des patients atteints de régression psychomotrice, le patient doit saisir la barre avec la main distale au côté de sortie du lit puis exercer une poussée avec la main proximale pour s'asseoir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peut convenir pour des patients hémiplegiques ou atteints de paralysie. • On associe souvent la barre de lit avec un guidon de transfert.
	<p>Déclaration CE de conformité. La barre de lit de redressement (Réfs : DEBARLI90 - DEBARLI140 - DEBARXXL - DEBARLIDOU - DECLIBAR90 - DECLIBAR140 - DEHAUBAR90 - DEBARCLIDOU) est répertoriée dans les produits dits de « classe 1 » selon la directive européenne 93/42.</p>

Barre latérale CANOLI®

■ Principe général

Permet le passage de la position allongée à la position assise au bord du lit en respectant le schéma moteur naturel. Cohabite parfaitement avec les barrières de lit. N'altère pas les fonctionnalités du relève-buste.

■ Mise en place

Pour les barres de lit double (Réfs : DEBARCLIDOU*, DEBARLIDOU*), l'installation s'effectue lorsque le lit est inoccupé.

■ Lit médicalisé ou tout lit équipé d'un dossier relevable

(Réfs : DEBARLI90, DECLIBAR90, DEHAUBAR90, DEBARXXL, DEBARLIDOU*, DEBARCLIDOU*)

- Redresser le dossier.
- Glisser la barre de lit entre le relève buste et le matelas, au dessus du bassin du patient, à droite ou à gauche.
- Pour solidariser la barre de lit, fixer une extrémité de la sangle velours Velcro sur la bande agrippante, entourer le relève buste du haut vers le bas avec la sangle velours Velcro qui s'accroche sur la bande agrippante opposée. Répéter la même opération pour le côté opposé.
- Après l'installation, vérifier que les possibilités de montée et de descente du relève-buste sont respectées.

■ Lits traditionnels de largeur 90 à 140 cm maximum

(Réfs : DEBARLI140, DEHAUBAR140)

- Glisser la barre de lit entre le sommier et le matelas, au dessus du bassin du patient, à droite ou à gauche.
- Pour solidariser la barre de lit, entourer le sommier de gauche à droite avec la sangle et fermer les boucles. Répéter la même opération pour le côté opposé.

* La largeur de la double barre s'ajuste grâce aux deux fourreaux.

