



alter <sup>eco</sup>  
sant <sup>e</sup>

Dauphin / Septembre 2009

# Planche Dauphin

La planche de transfert DAUPHIN est une planche en fibre de verre, traitée spécialement pour optimiser la qualité de glisse. Elle est conçue pour les transferts fauteuil-toilettes. Son ouverture permet de s'adapter à tous les sièges de toilettes.

SIIM406 DIM 69cmx38cm PDS 1,4Kg



FABRIQUE AU DANEMARK







9, boulevard de Maurens / 31270 Cugnaux  
Tél. : 05 34 46 03 76 / Fax. : 05 34 46 13 65  
contact@alterecosante.net/ www.alterecosante.net

# Planche DAUPHIN



**Avant toute utilisation, lire attentivement les conseils de manipulations et de prudence ci-après. Ces conseils vous permettront d'utiliser au mieux votre planche Dauphin.**

	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Placer la planche Dauphin entre les plans à relier</li><li>2 Insérer l'extrémité avec encoche sous l'hémi-fessier placé côté « arrivée »</li><li>3 Glisser à l'horizontale vers le W. C.</li></ol>
	Après utilisation, <b>la planche Dauphin ne doit pas rester au sol.</b>
	Pour favoriser la glisse, insérer du papier hygiénique entre la planche et la partie dénudée de l'utilisateur.
	<b>Déclaration CE de conformité.</b> La planche Dauphin (Réf. :SIIM604) est répertoriée dans les produits dits de « classe 1 » selon la directive européenne 93/42.

## ■ Principe général

Posé entre deux plans, la planche Dauphin permet au patient de glisser entre le fauteuil et les toilettes. Elle supporte un poids de 150 kg.

## ■ Conseils d'utilisation

Placer le fauteuil perpendiculairement aux toilettes ou en respectant un angle de 35°. Positionner la planche Dauphin de manière à recouvrir entièrement le siège de toilettes. Les encoches sont conçues pour épouser le passage de roues du fauteuil à gauche comme à droite. Assurez vous que les freins du fauteuil soient bloqués et que les surfaces adhésives de la planche soient bien positionnées.

Au préalable et avant toute utilisation, la planche Dauphin doit être essuyée et séchée à l'instar du siège de toilette.

## ■ Hygiène et entretien

Les procédés de lavage suivants doivent être utilisés :

- Lavage à l'eau savonneuse ou pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant.
- Essuyage léger avec un papier non tissé
- Séchage à l'air.

Tous les produits de notre gamme se conforment aux protocoles de désinfection hospitalière. Protocole de « nettoyage – désinfection et de compatibilité tissus » mis au point par la société ANIOS.

Produit recommandé : ANIOS détergent désinfectant surfaces hautes.

