



alter ^{co}
sant ^e

Ischio-Max / Septembre 2009

Sangle Ischio-Max

Cette ceinture de soutien par les ischions évite les prises vestimentaires. Très anatomique, l'Ischio-Max permet la mise debout, la marche allégée et le transfert siège à siège. Elle s'utilise aussi en association avec un disque de transfert.

- SI21632S (172 cm)
- SI21632M (208 cm)
- SI21632L (248 cm)

La sangle Ischio-Max est protégée auprès de l'INPI.

FABRIQUÉ EN FRANCE



9, boulevard de Maurens / 31270 Cugnaux
Tél. : 05 34 46 03 76 / Fax. : 05 34 46 13 65
contact@alterecosante.net/ www.alterecosante.net





Avant toute utilisation, lire attentivement les conseils de manipulation et de prudence ci-après. Ces conseils vous permettront d'utiliser au mieux votre sangle Ischio-Max.

	<ol style="list-style-type: none"> 1 Positionner la sangle sur le patient assis. 2 Saisir fermement le gousset pour assurer la prise. 3 Soulever le patient en toute sécurité
	<p>Après utilisation, la sangle Ischio-Max ne doit pas rester sur le sol.</p>
	<p>Sortie du siège de bain, son double maintien permet une bonne préhension sur un patient nu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remise à la marche et/ou marche accompagnée en sortie d'opération. • Associée avec un disque PÉDILETTE, on réalise un transfert en volte semi fléchie.
	<p>Déclaration CE de conformité. La sangle de transfert Ischio-Max (Réfs : SI21632S - SI21632M - SI21632L) est répertoriée dans les produits dits de « classe 1 » selon la directive européenne 93/42.</p>

Sangle ISCHIO-MAX

■ Principe général

La sangle de transfert Ischio-Max est une ceinture large, terminée à chaque extrémité par deux poignées et munie de goussets dorsaux. Positionnée sur un patient assis, elle permet au soignant de le soutenir au bassin par les ischiaux.

■ Conseils d'utilisation

- Le patient assis, le basculer légèrement vers l'avant pour faire glisser la sangle Ischio-Max en dorsal, les ouvertures des goussets vers le bas.
- Remettre le patient en appui sur le dossier de son siège.
- Mettre les deux extrémités de la sangle à l'intérieur des jambes.
- Soulevez légèrement la jambe droite du patient.
- Passer sous la jambe droite, l'extrémité droite, bien à plat, remonter vers la partie hinguinale.
- Relâcher la jambe droite, et procéder de la même façon pour la jambe gauche.
- Face au patient, le soignant saisit fermement dans chaque main, les dragonnes de la ceinture et glisse ses doigts à l'intérieur des goussets.
- Chaque main saisit fermement le gousset pour assurer la prise.
- Le soignant peut alors soulever le patient en toute sécurité.

■ Hygiène et entretien

L'un des procédés de nettoyage suivant doit être utilisé :

- Lavage à 60° en machine et séchage à 30°.
- Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant :
 - essuyage léger avec un papier non tissé ;
 - séchage à l'air.

Tous les produits de notre gamme se conforment aux protocoles de désinfection hospitalière. Protocole de « nettoyage – désinfection et de compatibilité tissus » mis au point par la société ANIOS.

Produit recommandé : ANIOS détergent désinfectant surfaces hautes.

