



alter^{eco}
santé

Long-Way / Septembre 2009

Le coussin **Long-Way**

Le coussin de rehaussement unidirectionnel Long-Way est conçu pour l'installation et le maintien du patient en position assise.

SIIM 34 G. Dim 130 x 42 cm



FABRIQUÉ AU DANEMARK



9, boulevard de Maurens / 31270 Cugnaux
Tél. : 05 34 46 03 76 / Fax. : 05 34 46 13 65
contact@alterecosante.net/ www.alterecosante.net



Avant toute utilisation, lire attentivement les conseils de manipulation et de prudence ci-après. Ces conseils vous permettront d'utiliser au mieux votre coussin de rehaussement Long-Way.

	<ol style="list-style-type: none"> 1 Placer le Long-Way plié en deux sur l'assise, l'étiquette rouge visible, dirigée vers le dossier. 2 Si l'espace existant entre le dossier et l'assise est suffisant, placer la sangle entre le dossier et l'assise. Sinon, placer la sangle entre le dos du patient et le dossier, faire remonter la sangle le long du dossier. 3 Le patient peut maintenant se rehausser seul ou avec l'aide d'un soignant. 4 Une fois le rehaussement effectué, le patient correctement positionné au fond de l'assise ne peut plus glisser en avant.
	<p>Après utilisation, le coussin Long-Way ne doit pas rester sur le sol.</p>
	<p>On peut positionner le coussin Long-Way sur des coussins d'aide à la prévention des escarres.</p>
	<p>Déclaration CE de conformité. Le coussin LONG-WAY (Réf SIIM 34 G) est répertorié dans les produits dits de « classe 1 » selon la directive européenne 93/42.</p>

Le coussin Long-Way

■ Principe général

Le coussin de rehaussement Long-Way est conçu pour l'installation et le maintien assis au fauteuil. Il est posé sur l'assise avant que le patient ne s'assoie, il facilite le rehaussement. Il évite le « glisser avant ». Son système unique de sangle permet à une tierce personne de rehausser le patient en respectant une posture sécuritaire.

- Rehaussement facilité par le système Multiglide.
- Système antiglisse assuré grâce aux bandes antidérapantes du système One-Way.
- Convient à tous les poids.
- Confort du patient grâce au revêtement velours.
- Sécurité du soignant ou de l'aidant grâce au système unique de sangle.

■ Conseils d'utilisation

Lors de l'installation sur l'assise, les deux faces avec les bandes blanches antidérapantes sont en contact. L'étiquette rouge doit donc être visible et positionnée en fond d'assise.

Si vous en avez la possibilité, positionner la sangle entre le dossier et l'assise. Une fois le patient assis, placer votre pied sur la sangle. Effectuer alors une pression vers le bas.

Le patient est alors confortablement installé sur l'assise.

■ Hygiène et entretien

Le procédé de lavage suivant doit être utilisé :

- Lavage à 70°C en machine — Séchage à 60°C

Tous les produits de notre gamme se conforment aux protocoles de désinfection hospitalière. Protocole de « nettoyage – désinfection et de compatibilité tissus » mis au point par la société ANIOS.

Produit recommandé : ANIOS détergent désinfectant surfaces hautes.

