

Hygiène et entretien

L'un des procédés de nettoyage suivant doit être utilisé :

- Lavage à 80° en machine et séchage à 65°.
- Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant :
 - essuyage léger avec un papier non tissé ;
 - séchage à l'air.
- Autoclave à 136°.

Tous les produits de notre gamme se conforment aux protocoles de désinfection hospitalière. Protocole de « nettoyage – désinfection et de compatibilité tissus » mis au point par la société ANIOS.

Produit recommandé : ANIOS détergent désinfectant surfaces hautes.

FABRIQUÉ AU DANEMARK



9, boulevard de Maurens / 31270 Cugnaux
Tél. : 05 34 46 03 76 / Fax. : 05 34 46 13 65
contact@alterecosante.net/ www.alterecosante.net



alter eco
santé

Drap Multiglide de rehaussement / Septembre 2009

Draps Multiglide de rehaussement

Le drap Multiglide de rehaussement est l'auxiliaire indispensable pour le rehaussement et le redressement du patient alité. Positionné sous le fessier jusqu'au dessus de la tête, il permet une mobilisation aisée du patient. Ce drap s'utilise sur tous les types de matelas, il contribue aussi à la prévention des escarres. Pour un travail à deux soignants, il est souhaitable d'utiliser les modèles munis de dragonnes.

- | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SIIM77 (72 cm x 70 cm) | <input type="checkbox"/> SIIM82 (200 cm x 80 cm) |
| <input type="checkbox"/> SIMM108 (108 cm x 80 cm) | <input type="checkbox"/> SIIM130DR (130 cm x 80 cm – Dragonnes) |
| <input type="checkbox"/> SIIM130 (130 cm x 80 cm) | <input type="checkbox"/> SIIM160DR (160 cm x 80 cm – Dragonnes) |
| <input type="checkbox"/> SIIM160 (160 cm x 80 cm) | |





Avant toute utilisation, lire attentivement les conseils de manipulation et de prudence ci-après. Ces conseils vous permettront d'utiliser au mieux les draps Multiglide.

	<ol style="list-style-type: none"> 1 Le patient nécessite une mobilisation au lit. 2 Latéraliser le patient et placer le drap Multiglide sous fessier et jusqu'au dessus de la tête. 3 Chacun des soignants saisit une dragonne et tire à l'horizontale vers la tête du lit.
	<p>Après utilisation, le drap Multiglide ne doit pas rester ni sur le sol, ni dans le lit. Les étiquettes sont toujours à l'extérieur.</p>
	<p>Il peut constituer :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une aide au retournement. • Seul, il peut être associé à une sangle Poulie (Réf. : SI 21680).
	<p>Déclaration CE de conformité. Les draps Multiglide de rehaussement (Réfs : SIIM77 - SIMM108 - SIIM130 - SIIM160 - SIIM82 - SIIM13ODR - SIIM16ODR) sont répertoriés dans les produits dits de « classe 1 » selon la directive européenne 93/42.</p>

Draps MULTIGLIDE de rehaussement



■ Principe général

Le tissu Multiglide est du nylon traité à haute température et ayant un très faible coefficient de friction. Il est imperméable. Le drap Multiglide est traité face externe pour adhérer au patient et face interne pour glisser. Le drap Multiglide de rehaussement et/ou de redressement est conçu pour les mobilisations et les soins au lit. Inséré comme une alèse sous le patient, le drap Multiglide de glisse facilite les déplacements latéraux quel que soit le type de couchage utilisé.

■ Conseils d'utilisation

Rehaussement

- Plier le drap dans sa longueur.
- Latéraliser le patient.
- Terminer l'installation du drap positionné du bassin à la tête. Si option dragonnes, elles sont placées sous fessier.
- Au coucher, positionner le drap et placer le patient dessus.

Rehaussement à 1 soignant

- Placer les mains sous le fessier et sous la tête du patient.
- Pieds écartés, un genou fléchi, l'autre tendu, effectuer une fente latérale pour accompagner le glissement du patient.

Rehaussement à 2 soignants

À deux soignants, le déplacement est identique. Il est conseillé d'utiliser une Haussière (Réf. : SI21619L) ou un modèle muni de dragonnes. Il existe différentes variantes de redressement, nous consulter.

Extraction du drap

- Pour retirer le drap, glisser un bras sous pli poplité, main plate, à l'intérieur du drap.
- Saisir le coin opposé inférieur, tirer vers soi à l'horizontale en se déplaçant vers la tête du lit.
- Le drap retiré, remettre le drap à l'endroit, étiquettes à l'extérieur.

Redressement en boussole (Terme SIFAM)

- Un bras pour guider les jambes, l'autre pour soutenir la tête, faire pivoter le patient en l'amenant vers la position assise.
- À la fin du mouvement, une jambe doit servir d'appui aux membres inférieurs du patient.

