



alter ^{co}
sant ^e

Transalt / Septembre 2009

Matelas de transfert **Transalt**

Une aide technique pour le transfert latéral sécurisé de patients polytraumatisés ou présentant des suspicions de fractures au niveau du rachis.

SI21500 (DIM 185 x 50 x 4 cm) – Poids 3 kg – Charge maximum 130 kgs.



FABRIQUÉ EN FRANCE



9, boulevard de Maurens / 31270 Cugnaux
Tél. : 05 34 46 03 76 / Fax. : 05 34 46 13 65
contact@alterecosante.net/ www.alterecosante.net



Avant toute utilisation, lire attentivement les conseils de manipulation et de prudence ci-après. Voici quelques précisions qui vous permettront d'utiliser au mieux votre matelas de transfert TRANSALT.

	<ol style="list-style-type: none"> 1 Positionner le Transalt sur le brancard. 2 Déposer le patient dessus. 3 Selon la configuration du transfert, utiliser en traction et en poussée tout ou partie.
	<p>Ne pas plier le matelas de transfert transalt de plus de 45°. Après utilisation, le matelas de transfert TRANSALT ne doit pas rester sur le sol.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Afin d'éviter un effet « ventouse », on peut mettre une alèze entre le brancard et le matelas de transfert TRANSALT. • Le matelas de transfert TRANSALT est radiotransparent et amagnétique.
	<p>Déclaration CE de conformité. Le matelas de transfert TRANSALT (Réf : SI21500) est répertorié dans les produits dits de « classe 1 » selon la directive européenne 93/42.</p>

Mémo PRATIQUE

Matelas de transfert TRANSALT

■ Principe général

Une housse fermée, composée pour le dessus d'une toile polyester à double induction PVC et pour le dessous d'une toile Dickson, enveloppe un complexage semi rigide de Forex 4 mm et de mousse à cellule fermée.

La housse extérieure est étanche, une face adhérente coté patient étiquetée **DESSUS** et une face glissante côté brancard.

Le matelas de transfert TRANSALT est muni de douze poignées résistant à des tractions de 600 kgs.

■ Conseils d'utilisation

Le matelas de transfert TRANSALT est déjà positionné sur le brancard avec l'étiquette **DESSUS** visible, lorsque le patient y est déposé.

Selon la configuration, en utilisant les différentes poignées, les soignants peuvent transférer le patient en toute sécurité du brancard à la table radio, à la table d'opération.

■ Hygiène et entretien

Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant.

Tous les produits de notre gamme se conforment aux protocoles de désinfection hospitalière. Protocole de « nettoyage – désinfection et de compatibilité tissus » mis au point par la société ANIOS.

Produit recommandé : ANIOS détergent désinfectant surfaces hautes.

