

BÂCHE DE MANUTENTION

RÉFÉRENCE

SI21617

La bache de manutention, utilisée par deux aidants, permet le relevage du sol et le transport d'un patient sur une courte distance.

Composée d'œilletons, elle peut également être utilisée lors du bain ou à la piscine.

Ses 11 poignées facilitent la mobilisation du patient, de façon confortable et sécurisée pour les soignants.

Son utilisation nécessite la connaissance des gestes et postures de manutention ■

LES PRODUIT

Prise facilitée pour les aidants grâce aux 11 poignées.

Peut être utilisée dans tout type d'environnement.

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
Traitement anti bactérien et anti fongicide.

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

You 



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	BÂCHE DE MANUTENTION
DESCRIPTION COURTE :	/
RÉFÉRENCE :	SI21617
DATE DE MISE À JOUR :	29/05/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	03760311370991
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	0,7 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	130 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Manutention manuelle par deux tierces personnes pour le ramassage et le transport d'un sujet sur une courte distance.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Après utilisation, ne pas laisser la bâche de manutention au sol.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTATION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases, acides, assouplissant eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. - Essuyage avec un détergent désinfectant type ANIOS. - Trempage en solution hospitalière détergente /désinfectante. - Ne pas repasser. - Blanchisserie interdite.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Bâche PVC anti bactérien et anti fongicide, sangles en PES 30mm, œillet daim.
CONDITIONNEMENT :	1 sac contenant une bâche de manutention et sa fiche technique.
COULEUR :	Noir.
DIMENSIONS :	100 x 40 cm.