

PLANCHE DE TRANSFERT SPÉCIALE TOILETTES

RÉFÉRENCE
SIIM406



La planche de transfert DAUPHIN®, conçue spécialement pour le transfert aux toilettes, est composée d'une surface lisse et glissante mais également d'une base antidérapante.

Positionnée entre le fauteuil et les toilettes, la planche DAUPHIN® permet à l'utilisateur de glisser entre les deux plans, de façon autonome ou accompagnée.

Les encoches assurent le blocage au niveau des roues du fauteuil roulant. Son ouverture permet de s'adapter à tout type de sièges de toilettes. Sa conception en fibre de verre est traitée spécialement pour optimiser la qualité de glisse.

Pour s'adapter à toutes les situations, la gamme "Planche de transfert" est composée de 7 modèles différents par la forme et les dimensions ■

LES + PRODUIT

S'adapte à tous types de sièges de toilettes.
Base antidérapante sécurisant le transfert.



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube

OPTIONS

GERIA-MAX

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


Peut être associé à une ceinture de transfert GERIAMAX® ou OLIVIA® pour sécuriser et faciliter le transfert.

OLIVIA



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	DAUPHIN®
DESCRIPTION COURTE :	PLANCHE DE TRANSFERT SPÉCIALE TOILETTES
RÉFÉRENCE :	SIIM406
DATE DE MISE À JOUR :	14/05/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	05708012259465
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	1,45 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
FABRICANT :	IMMEDIA
ORIGINE :	DANEMARK

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	<p>Doit être utilisée entre deux plans assis, pour un sujet présentant des difficultés de verticalisation, pour un transfert seul ou aidé.</p> <p>Pour un transfert assisté, évaluer si l'usage de ce produit est adapté au patient.</p> <p>Placer le fauteuil perpendiculairement aux toilettes ou en respectant un angle de 35°.</p> <p>Vérifier que les freins du fauteuil roulant soient bloqués et que les surfaces adhérentes de la planche soient bien positionnées.</p> <p>Au préalable et avant toute utilisation, la planche DAUPHIN® doit être essuyée et séchée à l'instar du siège de toilette. Avant le transfert, s'assurer que le patient n'a pas la peau pincée par la planche.</p>
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<p>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</p> <p>Après utilisation, la planche DAUPHIN® ne doit pas rester sur le sol.</p>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.</p> <p>Produits interdits : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.</p> <p>Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.</p> <p>Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression (Essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air).</p>
STOCKAGE :	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>
COMPOSITION :	<p>Fibre de verre.</p>
CONDITIONNEMENT :	<p>1 carton contenant une planche de transfert DAUPHIN® et sa fiche technique.</p>
COULEUR :	<p>Noir.</p>
DIMENSIONS :	<p>69 x 38 x 1,8 cm</p>