



## SANGLE DE TRANSFERT

RÉFÉRENCE  
SI21619

La sangle de transfert Haussière est une sangle multifonction. Composée d'une bride large, terminée à chaque extrémité par une dragonne souple, le soignant passe ses mains dans chacune des dragonnes pour réaliser un rehaussement ou pour aider certains déplacements assis-assis.

Au centre, la troisième dragonne permet l'intervention d'un deuxième aidant.

Lorsque le patient est assis, la sangle Haussière se place en bas du dos pour réaliser un transfert assis-assis.


La sangle Haussière se place sous fessier pour réaliser un rehaussement au lit, une marche fessière pour un rehaussement au fauteuil ou avec une planche de transfert assis-assis ■

## LES + PRODUIT

**3 dragonnes** permettant la mobilisation à l'aide de deux soignants.

**Taille universelle.**

**Multifonction :** transfert assis-assis, rehaussement au lit ou au fauteuil.

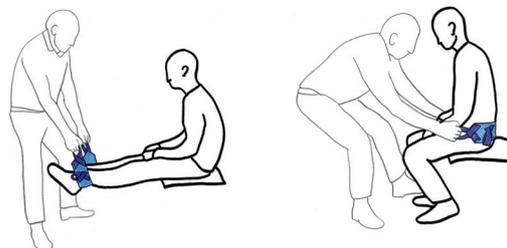

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



## OPTIONS

### MOUSTACHE



### MULTIGLIDE



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
### SPLIT



La sangle Haussière peut être utilisée avec l'appui tibial MOUSTACHE®, un drap MULTIGLIDE® ou encore une planche de transfert SPLIT® par exemple.



VOTRE CONSEILLER



### ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK



## FICHE TECHNIQUE

PRODUIT :	HAUSSIÈRE SIMPLE®
DESCRIPTION COURTE :	SANGLE DE TRANSFERT
RÉFÉRENCE :	SI21619
DATE DE MISE À JOUR :	14/05/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	03760311370984
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	110 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Manutention manuelle par une tierce personne pour aider et sécuriser le rehaussement au lit et au fauteuil. Doit être utilisée en respectant des principes de mobilisation sécuritaires.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</b> <b>Ne convient pas à un rehaussement depuis le sol.</b> <b>Après utilisation, la sangle Haussière ne doit pas rester sur le sol.</b>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. <b>Produits interdits :</b> Solvants, bases, acides eau de javel et produits abrasifs. <b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes. • Lavage à 60° en machine et séchage à 40°. • Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (Essuyage léger avec un papier non tissé, Séchage à l'air).
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Tissu PVC anti bactérien, anti fongicide. Sangle en polyéthylène.
CONDITIONNEMENT :	1 sachet contenant la sangle de transfert Haussière Simple et sa fiche technique.
COULEUR :	Noir.
DIMENSIONS :	10 x 70 cm