

APPUI TIBIAL ANTI ADDUCTION / ABDUCTION

RÉFÉRENCE
SI21635



Le dispositif MOUSTACHE® est une aide technique permettant de faciliter et de sécuriser les transferts par verticalisation aidée en face à face.

Placé sur les tibias du patient et verrouillé avec son système d'attaches rapides, MOUSTACHE® facilitera une verticalisation sécurisée en verrouillant (anti abduction et adduction) les jambes de la personne.

L'aidant doit positionner son tibia en opposition dans l'encoche prévue à cet effet ce qui permet un maintien axial des jambes lors du lever du patient ■

LES + PRODUIT

Léger, il est transportable facilement.

Universel, il s'adapte à tout type de morphologie.

Matériau **antibactérien**.

OPTION

OLIVIA



Dans certains cas, pour optimiser la verticalisation et son utilisation, MOUSTACHE® peut être associé avec une ceinture de transfert OLIVIA®, positionnée sur l'aidant, et un disque de transfert de type : PEDILETTE®, placé sous les pieds du patient.

PEDILETTE



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
© NFCA Pictures



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE


7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE

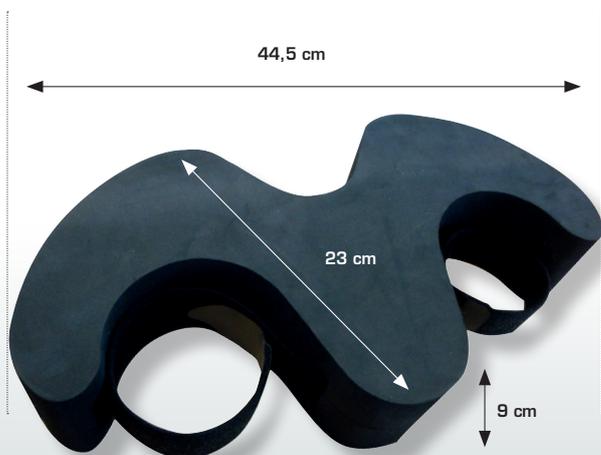

PRODUIT :	MOUSTACHE®
DESCRIPTION COURTE :	APPUI TIBIAL ANTI ADDUCTION / ABDUCTION
RÉFÉRENCE :	SI21635
DATE DE MISE À JOUR :	23/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS (*HORS PIÈCES D'USURE)
N° D'IDENTIFICATION UDI :	03760311370953
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	200 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	130 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE ET OCCITANIE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	<p>Manutention manuelle par une tierce personne, entre deux positions assises, d'un sujet présentant une incapacité de verticalisation autonome. Indiqué pour les sujets présentant une faiblesse musculaire modérée des membres inférieurs (force des quadriceps supérieure ou égale à 3/5).</p> <p>Indiqué pour les sujets présentant un déficit de contrôle des mouvements des membres inférieurs lors de la verticalisation (hypertonie en extension des genoux, adduction, abduction de hanche).</p> <p>Indiqué pour les premiers transferts post opératoire des personnes présentant une prothèse de hanche (en association avec un disque pivotant). Il est recommandé d'utiliser le dispositif en association avec une ceinture OLIVIA® placée sur l'aidant (pour les patients ayant une capacité de préhension). Il est recommandé d'utiliser le dispositif en association avec un disque pivotant.</p>
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<p>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</p> <p>Contre-indiqué pour les sujets présentant une hypotonie complète ou faiblesse musculaire importante des membres inférieurs ou un syndrome de régression psychomotrice. Contre-indiqué pour les sujets présentant une interdiction d'appui sur au moins un membre inférieur.</p>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.</p> <p>Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.</p> <p>Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.</p> <p>Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.</p>
PIÈCES D'USURE :	Sangles velcro.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	XPE, mousse de polyéthylène certifiée pour un usage médical classe I. Sangle velours et finition par accessoire en polyéthylène.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant 1 appui tibial MOUSTACHE® et sa fiche technique.
COULEUR :	Noir