

APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION

RÉFÉRENCE
RUVNM3000NC



Le STANDING NM est un appareil modulaire de verticalisation, permettant la station debout en toute sécurité.

Particulièrement adapté à une utilisation au domicile, il s'utilise également en centres de rééducation, centres hospitaliers et hébergements pour personnes âgées.

Il est principalement destiné à des patients présentant une diminution importante de la fonction motrice des membres inférieurs.

Il a été conçu pour assurer une verticalisation en toute sécurité grâce à l'appui-fessier simple bras. Equipé de coussins au niveau de l'appui-fessier et des genoux, le STANDING NM assure un maintien confortable pour le patient.

Grâce à son système télescopique, compensé par ressort, il est aisé d'obtenir un réglage en hauteur sans effort.

Ses nombreuses options permettent de l'adapter à différents profils de patients ■

LES + PRODUIT

Système télescopique permettant un réglage en hauteur sans effort.

Nombreux accessoires disponibles en option.

Déplaçable facilement.

OPTIONS

Appui-dos inclinable avant/arrière, réglable en hauteur
Réf : RUVAN2344NC

Appui-thoracique réglable en hauteur
Réf : RUVAN3045NC

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
Appui-frontal réglable en hauteur
Réf : RUVAN3046NC

Base roulante
Réf : RUVAG3080NC

VISIONNEZ NOS VIDEOS SUR LA CHAINE ALTER ECO SANTE



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

LES RÉGLAGES

| Dim. en mm par rapport au sol | Hauteur de la tablette | Hauteur de l'appui-fessier | Hauteur de l'appui-genoux | Encombrement Largeur/Longueur | Poids |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|
| Modèle Adulte | 900 à 1200 mm | 800 à 1050 mm | 380 à 700 mm | 650 à 750 mm | 30 kg |



FICHE TECHNIQUE

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| PRODUIT : | STANDING NM |
| DESCRIPTION COURTE : | APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION |
| RÉFÉRENCE : | RUVNM3000NC |
| DATE DE MISE À JOUR : | 02/07/2018 |
| CLASSE DE DISPOSITIF : | CLASSE 1 |
| GARANTIE* : | 2 ANS |
| N° D'IDENTIFICATION UDI : | EN COURS D'OBTENTION |
| GÉNÉRATION DE PRODUIT : | 5 |
| POIDS : | 30 KG |
| CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE : | 90 KG |
| FABRICANT : | RUPIANI |
| ORIGINE : | FRANCE |

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

| | |
|----------------------------------|---|
| INDICATIONS D'UTILISATION : | Verticalisation par une tierce personne d'un sujet présentant des difficultés de verticalisation autonome et à la station debout. Indiqué pour les sujets présentant une diminution importante de la fonction motrice des membres inférieurs. Doit être utilisé à plat sur une surface plane. |
| CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ : | Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Procéder à une révision du verticalisateur avant toute nouvelle utilisation. Ne pas manœuvrer le réglage de la tablette en hauteur si la tablette et le bras ne sont pas installés sur l'appareil. Ne pas laisser un patient seul sur l'appareil. |
| HYGIÈNE ET ENTRETIEN : | LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression. |
| STOCKAGE : | Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C). |
| COMPOSITION : | Acier, mousse polyuréthane injectée, bois, époxy et/ou chrome. |
| CONDITIONNEMENT : | 1 carton contenant 1 verticalisateur Standing NM, sa fiche technique et sa notice de montage. |
| COULEUR : | Gris. |