

ERGOTABLE ÉQUIPÉE DE RESSORTS À GAZ

RÉFÉRENCE : SUIVANT MODÈLE



Photo non contractuelle.

La gamme VARIANCE® propose des postes de travail permettant d'équiper judicieusement un service de rééducation.

Réglables en hauteur et en inclinaison de plateau, ces ergotables sont équipées d'une pédale actionnable au pied et de ressorts à gaz permettant ainsi un réglage rapide et précis, sans dépendre de l'électricité.

Les tables VARIANCE® sont équipées d'une échelle de graduation permettant de jauger facilement le réglage de la hauteur.

Les différents modèles sont livrés sur 4 pieds fixes réglables en hauteur, mais peuvent également être équipés de roulettes.

De nombreuses configurations sont possibles afin de s'adapter parfaitement à chaque pathologie. ■

LES + PRODUIT

Le ressort à gaz permet de ne pas dépendre de l'électricité.

Le pupitre est inclinable grâce au ressort à gaz.

L'échelle de graduation permet d'ajuster le réglage de la hauteur rapidement.



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
PERSONNALISATION POSSIBLE

- Plateau inclinable ou non
- 2 roulettes
- 4 pieds fixes réglables en hauteur
- 4 roulettes dont 2 roulettes freinées

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTÉ

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

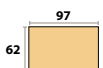
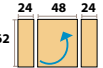
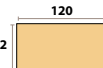
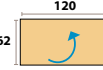
REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	VARIANCE®
DESCRIPTION COURTE :	ERGOTABLE ÉQUIPÉE D'UN RESSORT À GAZ
RÉFÉRENCE :	CF TABLEAU REF
DATE DE MISE À JOUR :	24/05/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	CF TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	55 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	130 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE ET OCCITANIE

INDICATIONS D'UTILISATION :	Poste de travail pouvant être ajusté en hauteur et inclinaison du plateau grâce à l'action de ressorts à gaz. Outil possédant une grande adaptabilité pour pouvoir accueillir une large population de personnes, tout en garantissant leur confort, ainsi qu'une zone de travail adaptée. La table doit être utilisée à une température de 16° à 30°.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne pas laisser un patient seul lors de l'utilisation de la table. Toute modification de structure de la table est strictement interdite. Ne pas utiliser la table si elle semble ne pas fonctionner ou répondre correctement aux commandes. En cas de choc violent sur la table (chute) le matériel doit être contrôlé par une personne agréée avant d'être réutilisé. Ne pas dépasser la charge maximale indiquée sur la fiche technique. Si vous dépassez cette valeur limite vous risquez d'endommager la table, de générer de potentiels risques lors de la prochaine utilisation et rendant la garantie caduque. Ne pas exposer au rayonnement direct du soleil, risque de brûlures légères. Attention aux éventuels pincements des extrémités lors du rabattement du pupitre. Ne pas s'appuyer violemment sur le pupitre lorsque ce dernier se trouve relevé au risque de dépasser la charge maximale d'utilisation et ainsi endommager la table. Ne pas retirer les caches de protections. Assurez-vous que l'utilisateur ou toute tierce personne comprennent les instructions fournies par le fabricant avant de l'utiliser. S'assurer avant utilisation de la stabilité de la table pour éviter tout basculement.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. Produits prohibés : Solvants, bases, acides eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression. Variance® est équipée de roulettes avec bandages de gomme tendre qui garantissent la stabilité pour les déplacements à vide. Elles nécessitent un contrôle d'usure régulier afin d'en maintenir l'efficacité. En cas d'abrasion importante, de déformation, bris, etc, procéder à leur échange.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Acier S235 (C45), PVC, HPL stratifié.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant 1 table Variance®, sa fiche technique et sa notice de montage.

Référence	Désignation	Dimensions*	Hauteur	Poids
VRG001NC N° Identification UDI : 03760311372100	 Ergotable plateau stratifié magnétique. Non inclinable	L 97 x P 62 cm	60 à 90 cm	55 kg
VRG002NC N° Identification UDI : 03760311372094	 Ergotable plateau stratifié magnétique. Pupitre complet inclinable à 80°	L 97 x P 62 cm	60 à 90 cm	55 kg
VRG003NC N° Identification UDI : 03760311372087	 Ergotable plateau stratifié magnétique. Pupitre centré 48 x 62 cm inclinable à 80°	L 97 x P 62 cm	60 à 90 cm	55 kg
VRG006NC N° Identification UDI : 03760311372070	 Ergotable plateau stratifié magnétique. Non inclinable	L 120 x P 62 cm	60 à 90 cm	55 kg
VRG007NC N° Identification UDI : 03760311372063	 Ergotable plateau stratifié magnétique. Pupitre complet inclinable à 80°	L 120 x P 62 cm	60 à 90 cm	55 kg
VRG400NC N° Identification UDI : 03760311372056	Option 4 pieds fixes réglables en hauteur. Pour tout modèle.	Hauteur : 7,3 cm		
VRG401NC N° Identification UDI : 03760311372049	Option 2 roulettes. Pour tout modèle.	Diamètre : 7,5 cm		
VRG402NC N° Identification UDI : 03760311372032	Option 4 roulettes dont 2 roulettes freinées. Pour tout modèle.	Diamètre : 7,5 cm		

* Tolérance mesure +/- 1 cm