

PLANCHE DE TRANSFERT

RÉFÉRENCE
SI420 / SI421 / SI422

La planche de transfert CARAVELLE® est composée d'une surface lisse et d'une base antidérapante. Positionnée entre deux plans assis, elle permet à l'utilisateur de glisser, d'une assise à l'autre, de façon autonome ou accompagnée.

On peut aussi l'utiliser pour les transferts voiture, toilette, bain, rééducation.

L'aile IXIR® est une option permettant d'assurer un transfert plus aisé et d'améliorer le glissement de l'utilisateur d'un plan assis à l'autre.

Pour s'adapter à toutes les situations, la gamme "Planche de transfert" est composée de 8 modèles différents par la forme et les dimensions ■

LES + PRODUIT

Forme courbée ergonomique.

Poignées ergonomiques permettant une préhension respectant la "pince" de la main.

Plots antidérapants sur la face intérieure.


OPTIONS

OLIVIA®



CARAVELLE® peut également être associée avec une ceinture de transfert OLIVIA® ou EMMA® pour sécuriser et accompagner lors du transfert.

EMMA®

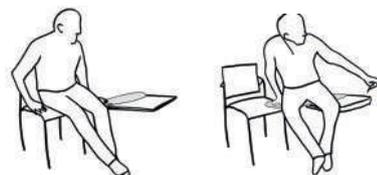


VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



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VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 



REF	Désignation
SI420 N° Identification UDI : 03760311370014	Planche de transfert CARAVELLE®
SI421 N° Identification UDI : 03760311370090	Planche de transfert CARAVELLE® avec aile de transfert
SI422 N° Identification UDI : 03760311370021	Aile de transfert pour planche de transfert CARAVELLE®

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT :	CARAVELLE®
DESCRIPTION COURTE :	PLANCHE DE TRANSFERT
RÉFÉRENCE :	SI420 / SI421 / SI422
DATE DE MISE À JOUR :	09/10/2019
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS* HORS PIÈCES D'USURE
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	1,3 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Doit être utilisée entre deux plans assis, pour un sujet présentant des difficultés de verticalisation, pour un transfert seul ou aidé. En zone humide, vérifier l'adhérence. Pour un transfert assisté, évaluer si l'usage de ce produit est adapté à l'aidé. Vérifier que la planche est bien en appui stable des deux côtés et que les freins des plans de départ et d'arrivée, s'ils en possèdent, sont verrouillés. Avant le transfert, s'assurer que le patient n'a pas la peau pincée par la planche.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Après utilisation, la planche CARAVELLE® ne doit pas rester sur le sol. Ne pas utiliser un produit fendu, coupé ou dépourvu de patins antidérapants. Ne pas exposer de façon durable au rayonnement solaire, risque de brûlure. CARAVELLE® est équipée de pistes antidérapantes pour assurer une stabilité importante de la planche. Elles nécessitent un contrôle d'usure régulier afin d'en maintenir l'efficacité. En cas d'abrasion importante, de déformation, bris, etc, procéder à leur échange.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
PIÈCES D'USURE :	Étiquettes et tampon antidérapant.
COMPOSITION :	PEHD.
CONDITIONNEMENT :	1 pochette contenant la planche CARAVELLE® et sa fiche technique.
COULEUR :	Blanc.
DIMENSIONS :	18 x 71,2 x 1 cm