

CEINTURE DE TRANSFERT

RÉFÉRENCE : SI21631




La ceinture de transfert GERIAMAX® est multifonction. Placée sur l'aidant, elle permet d'aider au lever ou lors d'une marche accompagnée, de face.

Elle peut également être placée sur le patient pour une marche accompagnée latérale.

Positionnée sur le patient, les 2 hanches bleues servent de repère et d'appui pour le soignant.

Positionnée sur le soignant, la ceinture de transfert GERIAMAX® dispose également de 2 hanches rouges destinées à l'appui du patient ■

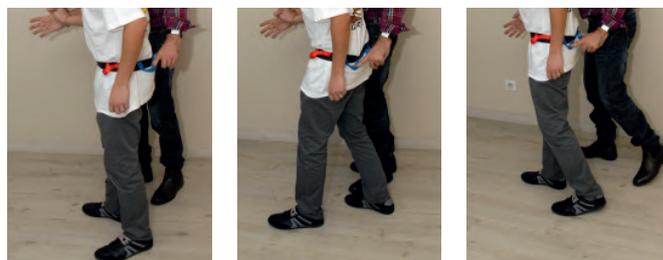

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube

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
LES + PRODUIT

Réglable à la taille par un fermoir à clip.

Double utilisation : sur le soignant ou sur le patient.



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE
7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE
TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65
CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	GERIAMAX®
DESCRIPTION COURTE :	CEINTURE DE TRANSFERT
RÉFÉRENCE :	SI21631
DATE DE MISE À JOUR :	30/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	03760311370977
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	100 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
TAILLE :	38 À 58
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE ET RHÔNE-ALPES AUVERGNE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	<p>Peut être positionnée sur le sujet ou sur l'aidant. Manutention manuelle par une tierce personne pour aider et sécuriser les transferts, la marche accompagnée et le lever. Avant de réaliser un transfert ou une marche accompagnée, ajuster la ceinture à la taille du sujet ou de l'aidant debout.</p>
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<p>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Après utilisation, la ceinture GERIAMAX® ne doit pas rester au sol.</p>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Lavage à 60° en machine et séchage à 30°. Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (Essuyage léger avec un papier non tissé, Séchage à l'air).</p>
STOCKAGE :	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>
COMPOSITION :	<p>Sangles en polypropylène, bouclerie en acétal.</p>
CONDITIONNEMENT :	<p>1 sachet contenant la ceinture de transfert GERIAMAX® et sa fiche technique.</p>
COULEUR :	<p>Noir, bleu et rouge.</p>
DIMENSIONS :	<p>Longueur 200 cm – Largeur 4 cm</p>