



SYSTÈME DE REHAUSSEMENT AU FAUTEUIL

RÉFÉRENCE :
SIIM2698121

Le système MULTIWAY® simplifie considérablement l'installation au fauteuil. Il permet de positionner un patient en fond d'assise sans effort.

Ce dispositif simple d'utilisation contribue au confort du patient lors de son installation au fauteuil et permet au soignant de travailler en sécurité.

Placé avant que le patient n'accède au fauteuil, il suffit au soignant d'appuyer avec son pied sur un étrier pour positionner le patient. Le MULTIWAY® est ensuite retiré.

L'utilisation du système MULTIWAY® est plus particulièrement recommandée pour les patients à forte charge pondérale ■

LES PRODUIT

Évite les prises douloureuses sur le patient.

Utilisation pour les patients à forte charge pondérale.

Allège considérablement le travail du soignant.

Confortable pour le patient lors du rehaussement.

Produit multi patient.



© NFCA Pictures

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


VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE
7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE
TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65
CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	MULTIWAY®
DESCRIPTION COURTE :	SYSTÈME DE REHAUSSEMENT AU FAUTEUIL
RÉFÉRENCES :	SIIM2698121
DATE DE MISE À JOUR :	21/05/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	05708012226351
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	3
POIDS :	300 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
FABRICANT :	IMMEDIA
ORIGINE :	DANEMARK

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Mobilisation manuelle par une tierce personne, d'un sujet présentant une incapacité ou des difficultés de rehaussement autonome au fauteuil. Avant utilisation, le coussin doit être plié à l'endroit où le nylon vert et gris se touchent. Le côté gris doit être face vers le haut sur le fauteuil. La poignée du coussin doit être vers l'arrière du fauteuil. Le patient doit être tenu pour ne pas basculer vers l'avant. Les pieds du patient doivent être positionnés sur le repose-pieds. Le fauteuil doit posséder une ouverture entre le dossier et l'assise.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne pas approcher d'une flamme nue ou d'une source de chaleur. Après utilisation, le système MULTIWAY® ne doit pas rester sur le sol.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases acides, eau de javel, assouplissant et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. - Lavage en machine à une température maximale de 80 °C. - Trempage en solution hospitalière détergente /désinfectante. - Séchage en machine à faible température avec programme linge délicat. - Ne pas repasser. - Blanchisserie interdite.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	100% nylon, polyéthylène, polyoxyméthylène (POM).
CONDITIONNEMENT :	1 sachet contenant un système MULTIWAY® et sa fiche technique.
COULEUR :	Vert, noir.
DIMENSIONS :	140 x 45 cm.