



SANGLES DE MAINTIEN SÉCURISÉ AU FAUTEUIL

RÉFÉRENCES :

C04001 / C04002 / C04003 / C04004 / C04005 / C04006 / C04010

La gamme PA6FIX est conçue pour sécuriser les patients au fauteuil. Leur système d'attache par bouclerie permet une installation facile. Tandis que les sangles équipées d'élastiques laissent au patient une liberté de mouvement pour respecter le besoin fondamental de se repositionner au fauteuil.

Les différents modèles s'adaptent à tout type de besoins des patients et offrent un confort de grande qualité grâce au coton d'Égypte.

Sombres, elles permettent une discrétion et peuvent ainsi être portées sur les vêtements tout en préservant la dignité ■

LES + PRODUIT

7 modèles disponibles en taille unique.

Elasticité, légèreté et souplesse.

Possibilité de concevoir des modèles sur demande.

Confort du coton.



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube

OPTION

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
SASSUFIX



Rallonge de sangle pour la gamme PA6FIX – 50 cm.
REF : C04000



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE

REF	Désignation	Long. Sangle	Diam.	Haut. mini.	Haut. max.	Poids
CO4001 <i>N° Identification UDI: 03760311370731</i>	Maintien abdominal ABDOFIX®	186 cm	Max 206 cm	/	/	0,10 kg
CO4002 <i>N° Identification UDI: 03760311370724</i>	Maintien thoracique STABIFIX®	/	Max 185 cm	25 cm base du tronc / poitrine	50 cm base du tronc / poitrine	0,20 kg
CO4003 <i>N° Identification UDI: 03760311370717</i>	Maintien péri-néal PERIFIX®	1,5 m	Min 63 cm Max 108 cm	/	/	0,15 kg
CO4004 <i>N° Identification UDI: 03760311370700</i>	Maintien péri-néal avec poignées latérales PERITRANS®	1,5 m	Max 108 cm	/	/	0,20 kg
CO4005 <i>N° Identification UDI: 03760311370694</i>	Maintien pelvien SIMPLIFIX®	135 cm	Max 187 cm	/	/	0,20 kg
CO4006 <i>N° Identification UDI: 03760311370687</i>	Maintien pelvien DOUBLEFIX®	Prof. 150 cm Larg. 137 cm	Max 187 cm	/	/	0,20 kg
CO4010 <i>N° Identification UDI: 03760311370670</i>	Maintien thoracique et pelvien double fixation MULTIFIX®	/	Max 185 cm	25 cm base du tronc / poitrine	50 cm base du tronc / poitrine	0,25 kg
CO4000 <i>N° Identification UDI: 03760311371271</i>	Rallonge de sangle	50 cm	/	/	/	0,10 kg

PRODUIT :	SANGLES DE MAINTIEN SÉCURISÉ AU FAUTEUIL
DESCRIPTION COURTE :	GAMME PA6FIX®
RÉFÉRENCES :	CO4001 CO4002 CO4003 CO4004 CO4005 CO4006 CO4010
DATE DE MISE À JOUR :	29/05/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	VOIR TABLEAU REF
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	NA
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE ET OCCITANIE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :

Avant utilisation d'un moyen de contention, consultez la recommandation ANSM du 08/03/2011 référence DM-RECO 11/02.

Indiqué pour le maintien d'un sujet au fauteuil et éviter la glisse passive.

Indiqué pour des sujets à risque de chute, en régression psychomotrice.

Indiqué pour des sujets déments Alzheimer.

Avant chaque utilisation, vérifier l'état des sangles, des coutures et des bouches de fermeture. Usage monopatient.

CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :

Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.

Ne pas utiliser un matériel abîmé ou défectueux.

HYGIÈNE ET ENTRETIEN :

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS.

Produits interdits : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.

- Lavage en machine à une température maximale de 60 °C.

- Repassage à faible température.

- Séchage en machine à une température modérée.

- Désinfection par pulvérisation de détergent désinfectant surfaces hautes compatible tissus.

STOCKAGE :

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

COMPOSITION :

Extérieur : 100% coton d'Egypte.

Intérieur : mousse de garnissage PE.

Sangle et bouclerie : 100% nylon.

CONDITIONNEMENT :

1 sac contenant une sangle de maintien et sa fiche technique.

COULEUR :

Bleu, gris.