

ETUDE CLINIQUE COMPARATIVE

(...) UNE ÉTUDE COMPARANT L'EFFICACITÉ DE LA POTENCE D'AIDE MALADE ET LA BARRE LATÉRALE DE REDRESSEMENT ALTER ECO SANTÉ, A ÉTÉ MENÉE AUPRÈS D'UNE POPULATION DE PERSONNES ÂGÉES HOSPITALISÉES EN SERVICE DE RÉADAPTATION AU CHU DE NÎMES. (...) 76.5% DES PATIENTS ONT RÉUSSI À S'ASSEOIR AU MOINS D'UN CÔTÉ DU LIT EN UTILISANT LA BARRE LATÉRALE DE REDRESSEMENT, CONTRE 21.5% AVEC LA POTENCE AIDE-MALADE. L'ANALYSE QUALITATIVE DU MOUVEMENT A MONTRÉ DES DÉGRADATIONS DES SCHÉMAS MOTEURS LIÉS À L'UTILISATION DE LA POTENCE AIDE-MALADE, EN PARTICULIER L'APPARITION DE DÉSÉQUILIBRES POSTÉRIEURS AINSI QUE LA DIMINUTION DE LA ROTATION LATÉRALES LIÉE AU MOUVEMENT NATUREL. L'UTILISATION DE LA BARRE LATÉRALE DE REDRESSEMENT A MONTRÉ UNE AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SCHÉMAS MOTEURS, LA POSITION EXCENTRÉE DE LA PRÉHENSION DE L'AIDE TECHNIQUE FAVORISANT LE MOUVEMENT NATUREL DE REDRESSEMENT ROTATION DU TRONC.

(ÉTUDE DISPONIBLE SUR DEMANDE)

LES + PRODUIT

Transfert autonome actif.

La gamme CANOLI® s'adapte à **tous les types de lits** quelles que soient la largeur et la hauteur du matelas.

Permet au patient de **réactiver son schéma moteur naturel**.

Soulage l'aidant d'un effort.

BARRE LATÉRALE DE REDRESSEMENT

RÉFÉRENCES :

DEBARLI90 / DEBARCOUL90 / DEBARCOUL90.02
 DEBARLI140 / DEBARCOUL140 / DEBARCOUL140.02
 DEBARLI200 / DEBARCOUL200 / DEBARCOUL200.02
 DEHAUBAR90 / DEHAUBAR140 / DEHAUBAR200 / DEBARLIDOU
 DEBARCLIDOU / DECLIBAR90 / DECLIBAR140 / DECLIBAR200 / DEBARSAC

La barre latérale de redressement CANOLI® permet le passage de la position allongée à la position assise au bord du lit, tout en respectant le schéma moteur naturel, sans l'aide d'une tierce personne.

La barre CANOLI® se positionne à droite ou à gauche, sur tous types de lit. Elle cohabite parfaitement avec les barrières de lit et les fonctionnalités d'un relèvement buste.

Elle répond aux exigences réglementaires en assurant la protection des patients les plus fragiles (recommandation ANSM sur l'utilisation des barrières de lit du 31/01/2006) ■



© NFCA Pictures

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


VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

