

DRAP DE TRANSFERT

RÉFÉRENCES :

SIIM108 / SIIM130 / SIIM160 / SIIM82 /
SIIM130DR / SIIM160DR / SIIM0077 /
SIIM001201 / SIIM00130 / SIIM00170



Le drap de transfert MULTIGLIDE® est indispensable pour rehausser ou mobiliser confortablement un patient atone. Il est traité face externe pour adhérer au patient et face interne pour glisser.


Inséré sous le patient, l'effet de glisse allège la charge de travail des soignants et contribue à la prévention des escarres. MULTIGLIDE® s'utilise sur tous types de couchages.

Il se décline en deux versions :

- **Imperméable pour un usage multi patients**
- **Perméable pour un usage mono-patient**



© NFCA Pictures

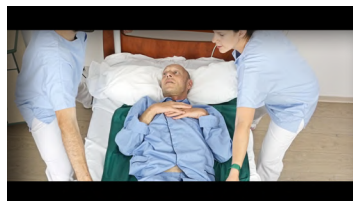

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube

LES + PRODUIT

La large surface de glisse des draps MULTIGLIDE® est **la plus adaptée à la mobilisation au lit.**

Il contribue à **la prévention des escarres** en évitant les cisaillements.

Le drap de transfert MULTIGLIDE® permet de **prévenir les lombalgies** en allégeant de 60% l'effort des soignants.

Une **qualité expertisée** depuis 25 ans.

ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

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
TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 



VOTRE CONSEILLER



FICHE TECHNIQUE

REF	Désignation	Dimensions Surface	Poids	N° Identification UDI
SIIM108	Drap MULTIGLIDE® Collectivité. Multi Patients imperméable.	108 x 80 cm 0,86 m ²	180 g	05708012000319
SIIM130	Drap MULTIGLIDE® Collectivité. Multi Patients imperméable.	130 x 80 cm 1,04 m ²	200 g	05708012000302
SIIM160	Drap MULTIGLIDE® Collectivité. Multi Patients imperméable.	160 x 80 cm 1,28 m ²	200 g	05708012000296
SIIM82	Drap MULTIGLIDE® Collectivité. Multi Patients imperméable.	200 x 70 cm 1,4 m ²	200 g	05708012000289
SIIM130DR	Drap MULTIGLIDE® Collectivité. Multi Patients imperméable avec 2 dragonnes.	130 x 80 cm 1,04 m ²	200 g	05708012000272
SIIM160DR	Drap MULTIGLIDE® Collectivité. Multi Patients imperméable avec 2 dragonnes.	160 x 80 cm 1,28 m ²	200 g	05708012000265
SIIM0077	Drap MULTIGLIDE® Collectivité. Mono Patient.	72 x 70 cm 0,55 m ²	180 g	05708012375080
SIIM001201	Drap MULTIGLIDE® Collectivité. Mono Patient.	130 x 90 cm 1,17 m ²	200 g	05708012003174
SIIM00130	Drap MULTIGLIDE® Collectivité. Mono Patient.	130 x 80 cm 1,4 m ²	200 g	05708012000241
SIIM00170	Drap MULTIGLIDE® Collectivité. Mono Patient bariatrique.	140 x 120 cm 1,68 m ²	200 g	05708012003181

PRODUIT :	MULTIGLIDE®
DESCRIPTION COURTE :	DRAP DE TRANSFERT
RÉFÉRENCES :	VOIR TABLEAU REF
DATE DE MISE À JOUR :	17/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	VOIR TABLEAU REF
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	300 KG
FABRICANT :	IMMEDIA
ORIGINE :	DANEMARK

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	<p>Manutention manuelle par une tierce personne pour les sujets présentant une incapacité de rehaussement ou de mobilisation en position allongée.</p> <p>S'utilise avec l'étiquette à l'extérieur.</p> <p>Doit être placé sous le patient : sous les fesses, les épaules et la tête.</p>
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<p>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</p> <p>Après utilisation, le drap MULTIGLIDE® ne doit pas rester ni sur le sol, ni dans le lit.</p> <p>Ne pas approcher d'une flamme ou d'une source de chaleur importante.</p> <p>Ne pas laisser un patient seul sur le drap, barrières de protection du lit baissées.</p>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS.</p> <p>Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel, adoucissant et produits abrasifs.</p> <p>Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.</p> <p>Le procédé de lavage suivant doit être utilisé :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavage à 80° en machine. • Séchage à 60° maximum. • Lavage à la main, trempage et essuyage. • Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air).
STOCKAGE :	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>
COMPOSITION :	<p>Nylon contre laqué à 160° avec enduction polyuréthane et laquage en fluo carbone.</p>
CONDITIONNEMENT :	<p>1 sachet contenant 1 drap de transfert MULTIGLIDE® et sa fiche technique.</p>
COULEUR :	<p>Vert</p>