

ALÈSES ET HOUSSES

RÉFÉRENCES :

SIIM4107S / SIIM4114S /
SIIM4122S / SC450040



Les produits EST OUEST 2D®, installés sur les matelas, sont indispensables pour faciliter les mouvements de côté au lit et pour rassurer lors d'un transfert couché-assis.

La surface satinée, au centre de l'alèse ou de la housse, dispose d'un faible coefficient de frottement.

Le mouvement de latéralisation est donc facilité, ce qui permet au patient de se tourner facilement dans son lit. Le travail de l'aidant sera d'autant plus simple que la longueur de cette bande sera importante.

Les bords de l'alèse ou de la housse, composés de coton et polyester, servent de frein au mouvement, permettant à l'utilisateur de s'asseoir sur le bord du lit, sans glisser ■

LES + PRODUIT

Le dispositif étant en permanence sur le lit, il est toujours utilisable.

Assure une sécurité pour le patient et pour l'aidant.

Alèse EST-OUEST 2D® Référence SIIM4107S / SIIM4114S : Possibilité d'utilisation avec un matelas à air.

© NFCA Pictures

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


VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE
7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE
TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65
CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE

Réf	Type Produit	Dimensions	Surface de glisse
SIIM4107S	Alèse	Pour lit de 90 cm : 85 x 200 cm	65 x 200 cm
SIIM4114S	Alèse	Pour lit de 90 cm : 200 x 200 cm	70 x 200 cm
SIIM4122S	Alèse	Pour lit de 140 à 180 cm : 280 x 200 cm	60 x 200 cm
SC450040	Housse	Pour lit de 90 cm : 90 x 200 cm	70 x 200 cm

Réf	N° Identification UDI
SIIM4107S	05708012001095
SIIM4114S	05708012001132
SIIM4122S	05708012001941
SC450040	05708012001118



PRODUIT :	EST-OUEST 2D®
DESCRIPTION COURTE :	ALÈSES ET HOUSSES
RÉFÉRENCES :	SIIM4107S / SIIM4114S SIIM4122S / SC450040
DATE DE MISE À JOUR :	02/03/2020
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	0,65 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	200 KG
FABRICANT :	IMMEDIA
ORIGINE :	DANEMARK

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Indiqué pour les sujets présentant des difficultés pour réaliser un mouvement de côté en position allongée, seuls ou accompagnés. La surface satinée de l'alèse ou de la housse doit toujours être côté patient.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Après utilisation, l'alèse ou la housse EST OUEST 2D® ne doivent pas rester sur le sol.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases, acides eau de javel, produits abrasifs, assouplissant. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. - Lavage en machine à une température maximale de 80 °C. - Lavage à la main, trempage et essuyage. - Séchage en machine à faible température avec programme linge délicat. - Repassage à froid ou à très faible température (- de 100 °C). - Blanchisserie interdite.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	60% coton, 40% polyester. Surface satinée : 100% polyester.
CONDITIONNEMENT :	1 sachet contenant un produit EST OUEST 2D® et sa fiche technique.
COULEUR :	Vert, blanc.