



DÉAMBULATEUR ELECTRIQUE AVEC APPUIS BRACHIAUX

"CADRE DE MARCHÉ"

RÉFÉRENCE : T0814789

Le cadre de marche TAURUS E PREMIUM® soutient en toute sécurité des utilisateurs ayant une faiblesse d'équilibre et de mobilité.

Il permet un soutien important lors de la marche et de la station debout. Il peut également être utilisé comme support pour passer de la position assise à la position debout.

Il a été développé pour être poussé et non tiré. L'utilisateur principal du produit est le patient lui-même. Néanmoins, le déambulateur peut être guidé par un accompagnant.

Le produit est conçu et agréé pour une utilisation en intérieur, sur sol plat et stable ■



A. Tenez le déambulateur près du corps pour obtenir un soutien optimal et une marche sûre B. Marcher droit en regardant devant soi permet de mieux garder l'équilibre comme illustré en C.

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



LES PRODUIT

Supports repose-bras et hauteur **réglables**

Poignées **ajustables**

Freins de conduite et de stationnement (freins sur toutes les roues)

Les roues arrières **pivotent à 360°** et peuvent être **bloquées en direction de la marche** en cas de besoin

ALTER ECO SANTE

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
7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

VOTRE CONSEILLER





Visuels non contractuels

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT :	TAURUS E PREMIUM®
RÉFÉRENCE :	T0814789
DESCRIPTION COURTE :	DÉAMBULATEUR ELECTRIQUE AVEC APPUIS BRACHIAUX
DATE DE MISE À JOUR :	03/06/2021
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS (*HORS PIÈCES D'USURE)
N° D'IDENTIFICATION UDI :	EN COURS D'OBTENTION
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	22 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
FABRICANT :	TOPRO
ORIGINE :	NORVÈGE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Régler la hauteur, les supports d'avant-bras, les poignées avant utilisation. Veiller à régler la barre d'appui à la bonne hauteur : tenez-vous debout, les épaules relâchées et les coudes à 90°. Taille recommandée de l'utilisateur : 140-210 cm. Vérifier que les freins de stationnement ne sont pas actionnés avant de commencer la marche. Se référer à la notice du fabricant.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. En cas de températures extrêmes, certaines parties du déambulateur peuvent devenir très chaudes ou très froides. Ne pas mettre ses doigts ou un objet entre les poignées et les leviers de frein pour éviter tout pincement. TOPRO TAURUS E ne doit pas être utilisé dans un environnement humide. Ne pas utiliser dans des escaliers. Ne le poussez pas violemment vers l'avant lorsque vous rencontrez un obstacle. Le déambulateur risque de basculer en entraînant des dommages.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	La désinfection doit être exécutée en essuyant les surfaces accessibles avec un désinfectant. La désinfection doit être faite par du personnel spécialisé agréé portant un équipement de protection adéquat. Le déambulateur peut être nettoyé avec un désinfectant contenant 70 à 80% d'éthanol. Les produits contenant du chlore ou du phénol sont déconseillés. Éviter de faire couler des liquides. Retirez la batterie avant de procéder à la désinfection. Laisser sécher le déambulateur à température ambiante avant utilisation, jusqu'à ce qu'aucune humidité résiduelle ne subsiste sur le déambulateur.
STOCKAGE :	La température maximale de stockage est de 50 °C. Le déambulateur doit être tempéré pendant 1h à 25 °C avant utilisation. La température minimale de stockage est de -20 °C. Le déambulateur doit être tempéré pendant 1h à 25 °C avant utilisation. Le déambulateur doit être stocké en position verticale (sur les 4 roues).
PIÈCES D'USURES :	Batterie, freins, roues et poignée
COMPOSITION :	Aluminium, plastique, polyester, polyuréthane. La batterie de type nickel / hydrures de métaux (NiMH) contient du nickel. Ne jetez pas la batterie dans la poubelle à déchets, mais dans des conteneurs prévus à cet effet, par exemple dans le point de collecte de batteries ou de déchets Recyclables de votre commune.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant 1 déambulateur TAURUS E PREMIUM® et sa fiche technique.
COULEUR :	Gris