

SET DE MOBILISATION AU LIT (ALÈSE ET HOUSSE)

RÉFÉRENCES :

SIIM4203S / SIIM4121SH / SIIM4221SH



Les produits EST OUEST 4D®, installés comme une housse sur le matelas, sont indispensables pour faciliter les mouvements de côté au lit et pour rassurer lors d'un transfert couché-assis.

La surface satinée dispose d'un faible coefficient de frottement au centre de l'alèse ou de la housse. Le mouvement dans le lit est donc facilité, ce qui permet au patient de se tourner facilement dans son lit.

Les produits 4D associent les produits 2D avec un drap de traction disposant d'une surface satinée. Cette combinaison crée un système permettant les mouvements dans toutes les directions. Cette solution est recommandée pour les patients à mobilité réduite ■

LES + PRODUIT

Le dispositif étant en permanence sur le lit, il est utilisable rapidement.

Assure une sécurité pour le patient et pour l'aidant.

Possibilité d'utilisation avec un matelas à air avec la référence SIIM4221SH.

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
© NFCA Pictures



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE
7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE
TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65
CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE

Réf	Type Produit	Dimensions	Surface de glisse
SIIM4203S Lit 90 cm	Housse Dessus Housse	23 x 90 x 200 cm 140 x 200 cm	70 x 200 cm 140 x 148 cm
SIIM4121SH Lit 140 à 180 cm	Drap satin avec poignées de traction	200 x 200 cm	147 x 200 cm
SIIM4221SH Lit 90 cm	Alèse Dessus Alèse avec poignées de traction	85 x 200 cm 200 x 200 cm	65 x 200 cm 147 x 200 cm

Réf	N° Identification UDI
SIIM4203S	05708012001385
SIIM4121SH	En cours d'obtention
SIIM4221SH	En cours d'obtention



PRODUIT :	EST-OUEST 4D®
DESCRIPTION COURTE :	SET DE MOBILISATION AU LIT (ALÈSE ET HOUSSE)
RÉFÉRENCES :	SIIM4203S / SIIM4121SH / SIIM4221SH
DATE DE MISE À JOUR :	02/03/2020
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	1,5 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	200 KG
FABRICANT :	IMMEDIA
ORIGINE :	DANEMARK

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Indiqué pour les sujets présentant des difficultés pour réaliser un mouvement en position allongée. Recommandé pour les personnes à mobilité réduite ou nulle. Border le drap de dessus entre deux mobilisations. La surface satinée de la housse ou de l'alèse doit toujours être côté patient.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Après utilisation, l'alèse, la housse ou le dessus EST OUEST 4D® ne doivent pas rester sur le sol.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases, acides eau de javel, produits abrasifs, assouplissant. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. - Lavage en machine à une température maximale de 80 °C. - Lavage à la main, trempage et essuyage. - Séchage en machine à faible température avec programme linge délicat. - Repassage à froid ou à très faible température (- de 100 °C). - Blanchisserie interdite.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	60% coton, 40% polyester. Surface satinée : 100% polyester.
CONDITIONNEMENT :	1 sachet contenant un set EST OUEST 4D® et sa fiche technique.
COULEUR :	Vert, blanc.