

CALE DE REHAUSSEMENT OU DE DÉCHARGE D'APPUI POUR GUIDON DE TRANSFERT DÉPLAÇANT AÏGO®, VERSO® ET DINO®

RÉFÉRENCE : SI21734



Alter Eco Santé fait évoluer ses produits pour toujours répondre aux besoins des utilisateurs. Ainsi, des cales STRADO® pour le guidon de transfert AÏGO®, ont été conçues pour accompagner les personnes présentant une incapacité de verticalisation autonome et nécessitant des ajustements au niveau de l'appui des membres inférieurs.

Les cales STRADO® permettent d'augmenter la hauteur d'appui podal, soit d'un seul côté, soit des deux côtés de façon indifférenciée.

Elles sont préconisées notamment pour les personnes présentant une contre-indication à l'appui sur l'un des membres inférieurs. Placées sous le membre inférieur sain, les cales STRADO® permettent d'augmenter la hauteur d'appui podal et ainsi restreindre l'appui sur le membre lésé.

Elles peuvent également être utilisées lorsque la hauteur d'assise est trop importante, rendant ainsi l'accès au châssis de l'AÏGO® impossible, et notamment pour les personnes de petite taille (moins de 155cm).

Egalement compatible avec les guidons de transfert déplaçants VERSO® et DINO® ■

LES PRODUIT

Permet de s'adapter à différentes pathologies et morphologies

Produit compatible au contact peau nue sans sensation de froid ou de chaud.

Simple d'installation

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
Matériau recyclable à 100%

Matériau à taux d'imbibition nulle


VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



VOTRE CONSEILLER



FICHE TECHNIQUE

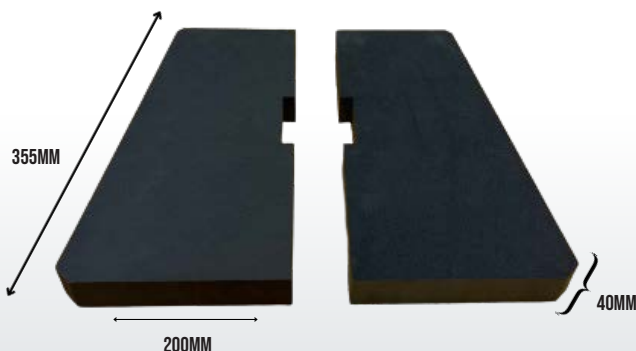

PRODUIT :	STRADO®
DESCRIPTION COURTE :	CALE DE REHAUSSEMENT OU DE DÉCHARGE D'APPUI
RÉFÉRENCE :	SI21734
DATE DE MISE À JOUR :	28/10/2022
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS (HORS PIÈCES D'USURE)
N° D'IDENTIFICATION UDI :	<i>EN COURS D'OBTENTION</i>
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	1156 LA CALE SOIT 2306 LES DEUX CALES
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Dispositif d'adaptation de l'ÂIGO aux besoins et à l'environnement du bénéficiaire. Indiqué dans le but d'une augmentation de la hauteur d'appui podal, dans le cas où la hauteur d'assise est trop importante, rendant ainsi l'accès au châssis de l'ÂIGO impossible, et notamment pour les personnes de petite taille (moins de 155cm). S'assurer du bon réglage des appuis tibiaux une fois la hauteur d'appui modifiée. Indiqué pour les sujets présentant une contre-indication à l'appui sur l'un de ses membres inférieurs. La cale est alors à placer sur le châssis, sous le membre inférieur sain, afin d'augmenter la hauteur d'appui et ainsi rendre impossible l'appui sur le membre lésé.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne pas utiliser un produit déchiré ou présentant un défaut d'intégrité. Ne pas utiliser un produit ressoudé ou recollé. Ne pas laisser le produit au sol, risque de chute. Ne pas laisser un patient seul sur STRADO et ÂIGO. S'assurer que la cale est bien positionnée sur l'ÂIGO avant de procéder à la verticalisation.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection de surface haute » mis au point par la Société ANIOS Produits prohibés : Solvants, bases acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air libre). Matériau à taux d'imbibition nulle.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Mousse polyéthylène PE15
CONDITIONNEMENT :	1 sac contenant une paire de cale de rehaussement STRADO et sa fiche technique.
COULEUR :	Anthracite