



Ceinture ARTUR®

VERTICALISATEUR ÉLECTRIQUE

RÉFÉRENCE : VS1000SPE

Le VISION® aide à la verticalisation sécurisée d'un patient par traction électrique. Actionné avec une commande sans fil, le verticalisateur électrique lui permet d'être verticalisé sans effort pour le soignant.

Les multiples réglages, réalisables sans outils, permettent de s'adapter à toutes les morphologies.

La tablette est réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison. Des appuis fessiers, tibiaux et cales pieds multi réglables assurent une station debout confortable. Équipé de quatre roues freinées, VISION® peut être facilement déplacé à vide.

Le VISION® peut être utilisé par des patients atteints de paralysie cérébrale, de paraplégie, de tétraplégie, ou de sclérose en plaque...

Dans ces cas, son utilisation est aussi préconisée pour le renforcement des muscles de la poitrine et l'amélioration de la circulation sanguine ■

LES + PRODUIT

Le déplacement du VISION® est facilité grâce aux 4 roues freinées.

Les différents réglages sont réalisables sans outils.

Le VISION® s'adapte à **toutes les morphologies**.

Alimentation électrique : 230 V

Équipement de série : VISION® avec câble d'alimentation 5m, commande sans fil, appui genou 3d, cale talons, fixation de pieds VELCRO®, supports arrière, coussin abdominal standard et système de levage ARTUR® adapté à VISION®

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

You Tube

OPTIONS

Ceinture de levage standard VS-0501

Ceinture de confort une face suède VS-0502

Support de dos avec supports latéraux et coussin de tête VS-0060

Coussin abdominal confort VS-0080



VOTRE CONSEILLER

ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	VISION®
DESCRIPTION COURTE :	VERTICALISATEUR ÉLECTRIQUE
RÉFÉRENCE :	VS1000SPE
DATE DE MISE À JOUR :	25/05/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS (*HORS PIÈCES D'USURE)
N° D'IDENTIFICATION UDI :	EN COURS D'OBTENTION
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	62 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
FABRICANT :	ATOFORM
ORIGINE :	ALLEMAGNE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Verticalisation électrique d'un sujet présentant une incapacité de verticalisation autonome. Indiqué également pour les sujets souffrant de paralysie cérébrale, paraplégie, tétraplégie ou sclérose en plaque. Effectuer un contrôle régulier de l'usage des roues. Doit être utilisé sur une surface plane.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne pas projeter d'eau sur le compartiment électrique.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes de pH neutre. Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant, essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air. Le VISION® est équipé de roulettes avec bandages de gomme tendre qui garantissent la stabilité pour les déplacements à vide. Elles nécessitent un contrôle d'usure régulier afin d'en maintenir l'efficacité. En cas d'abrasion importante, de déformation, bris, etc, procéder à leur échange.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	PVC, polyéthylène, acier, peinture époxy.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant 1 verticalisateur électrique VISION®, sa fiche technique et sa notice de montage.
COULEUR :	Gris.