



Version : A-2026
Date de Mise à Jour : 06/03/2026

Palettes sous fessières

POUR GUIDON AÏGO®

COLLECTIVITÉ



TRANSFERT ASSIS-DEBOUT-ASSIS

RÉFÉRENCE :

SYSPAL

**Elles sécurisent les déplacements
sur les guidons de transferts déplaçants**



Les palettes sous fessières sécurisent le patient pendant le transfert d'une assise à une autre avec le guidon de transfert déplaçant AIGO®.

L'utilisation combinée de l'AIGO® et des palettes sous fessières permet de solliciter les capacités, tout en rassurant le patient lors de la mobilisation.

La mise en place simple et rapide des palettes permet d'apporter un soutien adapté.

Le dispositif est ajustable en hauteur et s'adapte ainsi à la plupart des patients.



Il s'adresse à des **personnes nécessitant une aide et sécurité supplémentaire lors de la verticalisation avec un guidon de transfert déplaçant.**

+ SOINS QUOTIDIENS FACILITÉS

Les palettes sous fessières permettent un déshabillage ainsi qu'un accès au siège des toilettes en position debout.

i ASSOCIATIONS DE PRODUITS



**GUIDON DE TRANSFERT
DÉPLAÇANT AIGO®**

Réf : SIGO EVOL, SYGOSSEO



GARANTIE 2 ANS
HORS PIÈCE USURE



Garantie* : 2 ans (hors pièces d'usure)
Fabricant : Alter Eco Santé
Origine : France

Fiche Technique Palettes sous fessières

POUR GUIDON AÏGO

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION



Indiqué pour une utilisation en complément d'un guidon de transfert déplaçant AÏGO®. Manutention manuelle par une tierce personne, entre deux positions assises, d'un sujet présentant une déficience de verticalisation autonome, le cas échéant, une faiblesse musculaire modérée des membres inférieurs, possédant du tonus musculaire dans au moins un membre supérieur, ayant une tenue du tronc et une capacité à comprendre les consignes simples. Les palettes sous fessières pour guidon AÏGO® servent à sécuriser le patient lors du transfert. Vérifier le serrage du dispositif sur le guidon de transfert avant toute utilisation. Le temps de montage est inférieur à 5 minutes.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit. L'utilisation de nos produits avec tout autre aide technique ou dispositif médical, y compris de notre marque, doit être validé par un professionnel de santé pour assurer la sécurité du patient et du soignant.

CONDITIONNEMENT

1 carton contenant 1 système de palettes sous fessières pour AÏGO® et sa fiche technique.

CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

**Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.
Ne jamais utiliser un produit défectueux.**

Ne pas laisser un patient seul sur le guidon de transfert AÏGO®.
Vérifier l'état des palettes avant toute utilisation.

Ne pas exercer de force dans un sens jugé non conforme à l'utilisation du produit.

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualité@alterecosante.net).

PIÈCES D'USURE

Palette (ref : ZPAL), palier lisse pivot (ref : ZPLPIVOT).

Seules les pièces d'origines fournies par le fabricant assurent la conformité du produit, le niveau de service et la sécurité exigés par le concepteur.

COMPOSITION & COULEUR

Matière : Acier, Polyéthylène.
Couleur : Vert anis.

Charge maximale admissible : 150 kg

HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.

Le procédé de lavage suivant doit être utilisé :

- Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.
- Compatible protocoles de bionettoyage et désinfection vapeur selon la norme NF T72-110 pour la désinfection à la vapeur (utilisation D-VAP PRISM).

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température.

RÉFÉRENCE	N° IDENTIFICATION UDI	DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS
SYSPAL	03760311372384	Palettes sous fessières pour guidon déplaçant AÏGO®	Palette : hauteur 24,7 cm Largeur totale : 58 cm	4,5 kg