



NOTICE D'UTILISATION

AUTOMAX[®]

APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION GUIDON DE TRANSFERT FIXE



Version : B-2026
Date de Mise à Jour : 30/04/2026



Alter Eco Santé
7 impasse du Pradié 31270 Villeneuve Tolosane – France
05.34.46.03.76 – contact@alterecosante.net
www.alterecosante.net

NOTICE D'UTILISATION

Cette notice d'utilisation fournit les informations essentielles relatives à l'utilisation sûre et correcte du dispositif médical AUTOMAX®.
Elle doit être lue attentivement avant toute utilisation et conservée pour référence ultérieure.

Le dispositif médical cité est conforme aux exigences applicables du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

L'utilisateur est tenu de respecter les instructions, avertissements et précautions décrits dans ce document afin de garantir la sécurité du patient et des utilisateurs ainsi que la performance attendue du dispositif.

AUTOMAX® est un guidon de transfert fixe qui se compose d'une barre d'appui réversible réglable en hauteur, d'une plateforme ergonomique et de roulettes facilitant le transport à vide.




Garantie : 2 ans hors pièces d'usure (6mois)
Fabricant : Alter Eco Santé
Origine : France
Classe du dispositif médical : Classe 1



COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT	3
ETIQUETTE	3
SYMBOLES	4
DESTINATION DU DISPOSITIF	4
PERFORMANCE CLINIQUE	5
CONDITIONS D'UTILISATION PREVUES	5
UTILISATION	5
NOTICE DE MONTAGE ET DIMENSIONS	6
MATERIAUX ET ENTRETIEN	6
STOCKAGE ET MISE AU REBUT	7
SECURITE	7
PRODUIT, ACCESSOIRES ET PIECES D'USURE	7

COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT

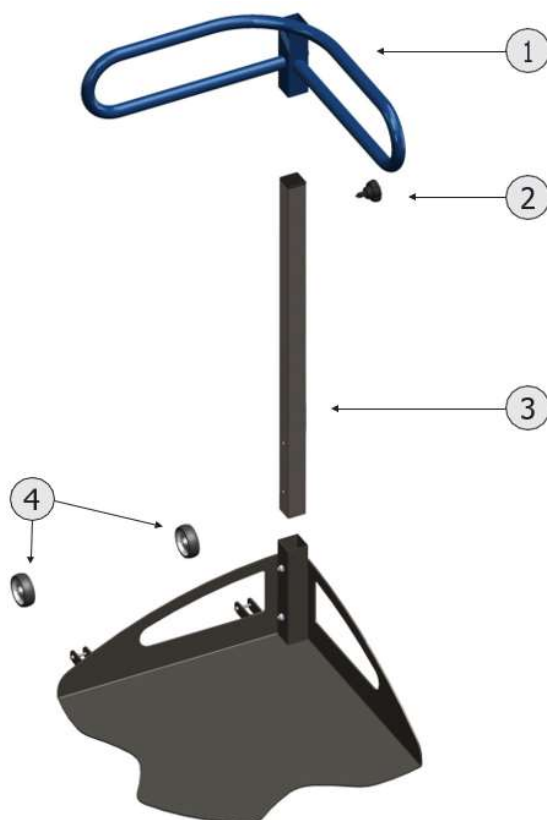

N°	Code Article	Désignation
1	ZGUIDABA	Barre d'appui bras
2	ZMSAA	Molette de serrage indexée (réglage en hauteur du bras)
3	ZGUIDAM	Mat chromé
4	ZGUIDAR	Roue

CONDITIONNEMENT

1 carton contenant 1 guidon de transfert AUTOMAX® et sa notice d'utilisation.

ETIQUETTE












alter éco santé REF SIGUIDA EVOL
AUTOMAX®

MD CE SN DEA-2026050 2026-01

(01)3760311370274(21)DEA-2026050(11)202601

Alter Eco Santé - 7 impasse du Pradié 31270 Villeneuve Tolosane
Tel : 05.34.46.03.76

SYMBOLES

	Fabricant		Référence catalogue
	Date de fabrication AAAA-MM-JJ (Année-Mois-Jour)		Numéro de série
	Consultez la notice d'utilisation		Numéro d'identification UDI
	Dispositif médical		Marque CE
	Ne pas exposer à la lumière du soleil		

DESTINATION DU DISPOSITIF

INDICATIONS

Manutention manuelle par une tierce personne ou seul, entre deux positions assises, d'un sujet présentant une déficience de verticalisation autonome, le cas échéant, une faiblesse musculaire modérée des membres inférieurs, possédant du tonus musculaire dans au moins un membre supérieur, ayant une tenue du tronc et une capacité à comprendre les consignes simples.

CONTRE INDICATIONS

Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne pas utiliser un produit défectueux. Ne pas utiliser sous la douche. Ne pas utiliser en sauna ou hammam. Ne jamais s'asseoir sur la barre d'appui.

UTILISATEURS

Sujet présentant une déficience de verticalisation due à une désadaptation motrice demandant un point d'appui supplémentaire avec les membres supérieurs pour passer d'un pied sur l'autre, et/ou présentant une peur du vide à la suite d'une répétition de chutes et provoquant une rétroimpulsion du sujet.

PERFORMANCE CLINIQUE

Performance clinique :

- Efficacité fonctionnelle : Les guidons de transfert permettent d'assurer des transferts assis-debout-assis sécurisés et reproductibles, en favorisant l'activation motrice du patient.
- Adaptabilité : Différents modèles (pivotants, déplaçant, fixes) permettent de répondre aux besoins spécifiques des patients (pédiatrie, gériatrie, mobilité réduite modérée, prise en charge bariatrique).

Performance Technique


- Fiabilité mécanique : Testés à plus de 100 000 cycles d'utilisation (CERAH), confirmant leur durabilité et leur résistance dans des conditions d'usage normal.
- Capacité de charge : Dispositifs conçus pour supporter :
 - 130 kg pour AUTOMAX®
 - 200 kg pour AUTOMAX® XL
 - 150 kg pour tous les autres dispositifs de la gamme « guidons de transfert »

- Cf *PEC01 Guidon Plan d'évaluation clinique* et *REC01 Guidon Rapport d'évaluation clinique*

CONDITIONS D'UTILISATION PREVUES

Le guidon de transfert est destiné à évoluer sur un sol plat, régulier et sans obstacle. Il est utilisé soit entre deux positions assises (Tous les autres modèles), soit entre une position assise et de marche (AUTOMAX).

UTILISATION

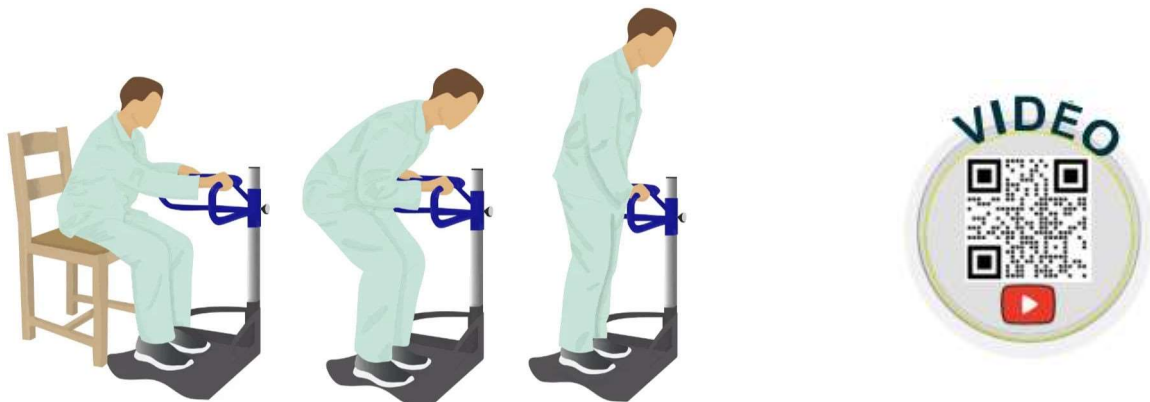


Avant l'utilisation du guidon, procéder au réglage de la hauteur de la barre d'appui.

Les réglages peuvent varier selon les pathologies et morphologies.

Avant utilisation, veiller à bien serrer au maximum les molettes de réglages.

Les roulettes sont prévues **uniquement pour le déplacement à vide** de AUTOMAX®.

NOTICE DE MONTAGE ET DIMENSIONS

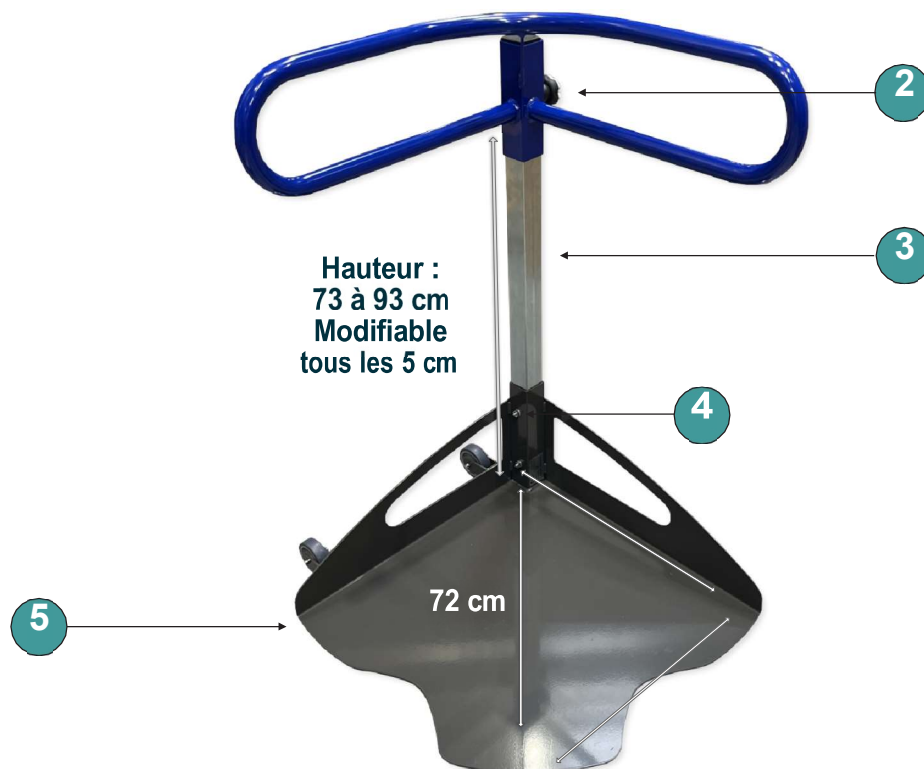

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Poser la plateforme **5** à plat sur le sol ;
2. Enfiler le mât **3** dans le tube de la plateforme ;
3. Visser les deux boulons **4** de diamètre 13 avec une clé BTR ;
4. Enfiler la barre d'appui **1** à la hauteur voulue sur le mât et serrer la molette indexée **2**

MATERIAUX ET ENTRETIEN

MATERIAUX

Acier, peinture epoxy, PVC.

Couleur du dispositif : Bleu.

ENTRETIEN

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.

Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.



Compatible protocoles de bionettoyage et désinfection vapeur selon la norme NF T72-110 pour la désinfection à la vapeur (utilisation D-VAP PRISM).

Afin de prévenir tout risque de contamination croisée, il est recommandé de nettoyer le dispositif entre deux patients (ou deux utilisateurs distincts), et au minimum une fois par jour.

STOCKAGE ET MISE AU REBUT

STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température. Eviter l'exposition au soleil.

MISE AU REBUT

Vérifiez la disponibilité d'options de recyclage respectueuses de l'environnement et appliquez les dispositions légales nationales en vigueur. L'élimination du dispositif doit être effectuée conformément à la réglementation applicable.

SECURITE

SPECIFICATIONS

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical ou un professionnel de santé qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit. En cas d'évènement indésirable, consultez votre professionnel de santé.

Seuls les accessoires fournis par Alter Eco Santé sont compatibles avec nos dispositifs.

L'utilisation de nos produits avec tout autre aide technique ou dispositif médical, y compris de notre marque, doit être validé par un professionnel de santé pour assurer la sécurité du patient et du soignant.

CONTROLE PERIODIQUE

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualite@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

PRODUIT, ACCESSOIRES ET PIECES D'USURE

PRODUIT ET VARIANTES

RÉFÉRENCE	N° IDENTIFICATION UDI	DÉSIGNATION	POIDS	CHARGE MAX. ADMISSIBLE
SIGUIDA EVOL	03760311370274	Guidon de transfert fixe AUTOMAX®	21 kg	130 kg
SIGUIDA XL	03760311370267	Guidon de transfert fixe AUTOMAX® XL	26,5 kg	200 kg

ACCESSOIRES



Seuls les accessoires Alter Eco Santé sont autorisés pour l'utilisation du dispositif.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
SIGUITRA	Traces de pas antidérapantes

PIECES D'USURE

- Roulettes (ref : ZGUIDAR)
- Empreintes de pas (ref : SIGUITRA)

Seules les pièces d'origine fournies par le fabricant assurent la conformité du produit, le niveau de service et la sécurité exigés par le concepteur.

GARANTIE

2 ans hors pièces d'usure (6 mois). Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect préconisations d'entretien du fabricant.