




NOTICE D'UTILISATION

CANOLI®

BARRE LATÉRALE DE REDRESSEMENT

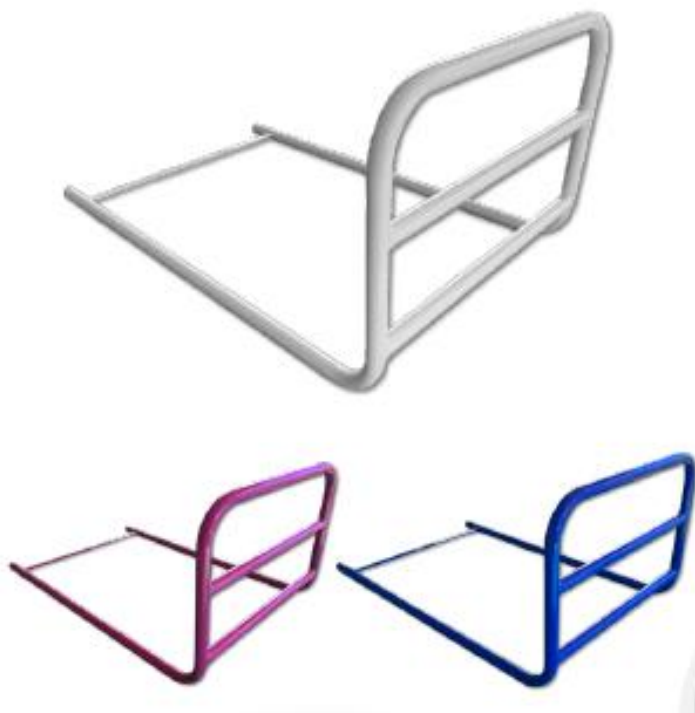

Version : B-2026

Date de Mise à Jour : 30/04/2026



Alter Eco Santé

7 impasse du Pradié 31270 Villeneuve Tolosane – France

05.34.46.03.76 – contact@alterecosante.net

www.alterecosante.net

NOTICE D'UTILISATION

Cette notice d'utilisation fournit les informations essentielles relatives à l'utilisation sûre et correcte du dispositif médical CANOLI®.
Elle doit être lue attentivement avant toute utilisation et conservée pour référence ultérieure.

Le dispositif médical cité est conforme aux exigences applicables du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

L'utilisateur est tenu de respecter les instructions, avertissements et précautions décrits dans ce document afin de garantir la sécurité du patient et des utilisateurs ainsi que la performance attendue du dispositif.

CANOLI® est une barre latérale de redressement s'intégrant parfaitement dans le quotidien des utilisateurs.
En effet, toujours en place au lit, elle leur permet de solliciter et réactiver leurs capacités pour se mettre en position assise au bord du lit tout en respectant le mouvement naturel (schéma moteur naturel).
Ses différentes versions lui permettent de s'adapter à tous les matelas et lits y compris médicalisés (compatible avec les barrières de lit et les fonctionnalités d'un relèvement buste).
CANOLI® existe en blanc, fuchsia et bleu.



Garantie : 2 ans hors pièces d'usure (6mois)
Fabricant : Alter Eco Santé
Origine : France
Classe du dispositif médical : Classe 1




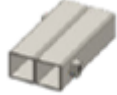


COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT	3
ETIQUETTE	3
SYMBOLES	4
DESTINATION DU DISPOSITIF	4
PERFORMANCE CLINIQUE	5
CONDITIONS D'UTILISATION PREVUES	5
UTILISATION	6
NOTICE DE MONTAGE ET DIMENSIONS	6
MATERIAUX ET ENTRETIEN	7
STOCKAGE ET MISE AU REBUT	8
SECURITE	8
PRODUIT, ACCESSOIRES ET PIECES D'USURE	9

PIÈCES DÉTACHÉES ET CONDITIONNEMENT

Les vues éclatées des produits sont disponibles et fournies sur demande.

PIÈCES DÉTACHÉES

CODE ARTICLE	DESIGNATION	PHOTO
ZSANVELNC	Kit de fixation de rechange (sangles Velcro et accroches) pour barres de redressement CANOLI® références 90.	
ZDEBARKIT140NC	Kit de fixation de rechange (sangles) pour barres latérales de redressement CANOLI® références 140.	
ZDEBARKIT200NC	Kit de fixation de rechange (sangles) pour barres latérales de redressement CANOLI® références 200.	
JONC	Jonction pour CANOLI référence DEBARLIDOU - La paire	

CONDITIONNEMENT










1 sachet contenant 1 barre latérale de redressement CANOLI®, son kit de fixation, sa notice d'utilisation et sa notice de montage.

ETIQUETTE



alter éco santé **REF DEBARLI90** 
CANOLI®
MD **CE** **LOT** 04-2026  2026-04-16
⚠ VERIFIEZ MA FIXATION
UDI 
(01)03760311370069(11)260416(10)426
Alter Eco Santé - 7 impasse du Pradié 31270 Villeneuve Tolosane 
Tel : 05.34.46.03.76

SYMBOLES

	Fabricant		Référence catalogue
	Date de fabrication AAAA-MM-JJ (Année-Mois-Jour)		Numéro de série
	Consultez la notice d'utilisation		Numéro d'identification UDI
	Dispositif médical		Marque CE
	Ne pas exposer à la lumière du soleil		

DESTINATION DU DISPOSITIF

INDICATIONS

Dispositif destiné à accompagner et à sécuriser le passage d'un sujet de la position allongée à la position assise au bord du lit (ou inversement). L'utilisation peut être faite de manière indépendante, en guidé surveillé ou en aide partielle. Indiquée pour les sujets atteints, entre autres, de désadaptation psychomotrice, de douleurs dorsales, d'une faiblesse abdominale, d'une hémiplégie ou atteints de paralysie partielle.

Mise en œuvre et utilisation par une personne préalablement informée des conditions de sécurité liées à l'usage du produit.

CONTRE INDICATIONS

Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne jamais utiliser un produit défectueux.

Le montage ne doit pas être réalisé sur un lit ne permettant pas d'appliquer strictement les instructions de montage.

Le dispositif n'est pas destiné à être utilisé depuis l'extérieur du lit pour se verticaliser, ou pour se rapprocher du lit.



AVERTISSEMENTS

- La barre latérale doit impérativement être installée à une distance soit inférieure à 60 mm de la tête de lit, soit supérieure à 318 mm de la tête de lit pour éviter tout risque d'étranglement.
- Le contrôle de la bonne fixation de la CANOLI® au lit doit être effectué à chaque fois que le lit est refait, ou à défaut au moins 1x/semaine, par le personnel soignant.
- En cas de constatation de détérioration du kit de fixation, cesser immédiatement l'utilisation de la CANOLI® et procéder au remplacement du kit de fixation.
- L'utilisation d'un kit de fixation défectueux ou non conforme peut entraîner des conséquences irréversibles.
- Seules les sangles de fixation fournies par Alter Eco Santé sont conformes.
- Le montage du kit de fixation est obligatoire et doit être réalisé conformément aux instructions fournies par Alter Eco Santé.
- Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation et ses fixations est obligatoire.
- Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.
- Le kit sangles Velcro doit être changé systématiquement lors du changement d'affectation de la barre de lit.

Charge maximale admissible : 150 kg

UTILISATEURS

- Personnel soignant (Transfert guidé)
- Aidant proche du sujet (Transfert guidé)
- Sujets présentant une déficience de verticalisation autonome, et/ou atteint de désadaptation psychomotrice, de douleurs dorsales, d'une faiblesse abdominale, d'une hémiplegie ou atteint de paralysie partielle, ayant une tenue du tronc et une capacité à comprendre les consignes simples.

PERFORMANCE CLINIQUE

- Assistance mécanique au redressement et au repositionnement au lit
- Mise à disposition d'un point d'appui stable et sécurisé
- Transmission des efforts sans déformation ni instabilité dans les conditions normales d'utilisation prévues

CONDITIONS D'UTILISATION PREVUES

Utilisation par un sujet, pour le passage de la position allongée à la position assise au bord du lit, sans l'aide physique d'une tierce personne. L'utilisateur peut être guidé par une tierce personne. La barre doit être solidaire du relèvement buste s'il existe. La barre doit être positionnée sur le tiers supérieur du lit. L'installation des barres de lit s'effectue lorsque le lit est inoccupé. Le kit sangles Velcro doit être changé systématiquement lors du changement d'affectation de la barre de lit.

Les modèles DECLIBAR et DEBARCLIDOU sont conçus pour un usage dans les services de soin pouvant avoir besoin de procéder à du brancardage d'urgence, la partie accessible au patient pouvant être escamotée sans outil par simple traction vers le haut par le personnel d'intervention (service de cardiologie, box de service d'urgence, service de neurologie ...).


UTILISATION

CANOLI® est une barre latérale de redressement s'intégrant parfaitement dans le quotidien des utilisateurs. Elle est compatible avec les relève-buste, ainsi qu'avec les barrières de lit proposées par le fabricant du lit.

En effet, toujours en place au lit, elle leur permet de solliciter et réactiver leurs capacités pour se mettre en position assise au bord du lit tout en respectant le mouvement naturel (schéma moteur naturel). Pour cela, le patient vient chercher avec la main opposée la barrière de lit. Ce geste va lui permettre de se placer en décubitus latéral. Il va pouvoir ensuite sortir les jambes du lit et pousser vers le haut sur la barre. Il se trouve ainsi assis en bord de lit. Le cheminement inverse va lui permettre de s'allonger sur son lit.

Ses différentes versions permettent d'adapter CANOLI® à tous les matelas et lits y compris médicalisés (compatible avec les barrières de lit et les fonctionnalités d'un relève buste).

CANOLI® existe en blanc, fuchsia et bleu. Les couleurs fuchsia et bleu permettent d'augmenter le contraste et favorisent l'utilisation de CANOLI® pour des patients ayant une basse vision.

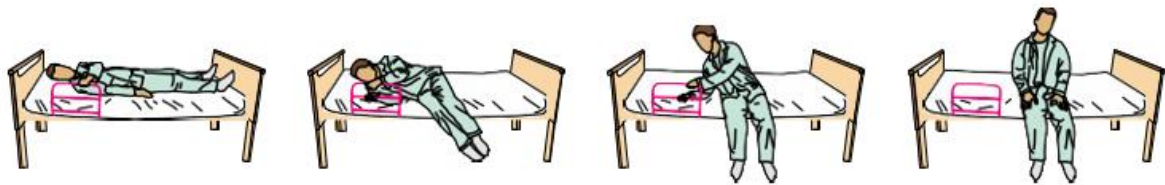

NOTICE DE MONTAGE ET DIMENSIONS

Une notice de montage est fournie avec chaque produit. Cette notice doit impérativement être consultée pour toute installation de produit de la gamme CANOLI®

Charge maximale admissible : 150 kg.



Référence	Poids	Dimensions
DEBARLI90	2,35 kg	68 x 42 x 32 cm
DEBARLI140		
DEBARLI200		
DEBARCOUL90	2,35 kg	68 x 42 x 32 cm
DEBARCOUL140		
DEBARCOUL200		
DEBARCOUL90.02	2,35 kg	68 x 42 x 32 cm
DEBARCOUL140.02		
DEBARCOUL200.02		
DEHAUBAR90	2,55 kg	68 x 42 x 42 cm
DEHAUBAR140		
DEHAUBAR200		
DECLIBAR90	2,35 kg	68 x 42 x 32 cm
DECLIBAR140		
DECLIBAR200		
DEBARLIDOU	2,55 kg	93 à 123 x 42 x 32 cm
DEBARCLIDOU	2,55 kg	92 x 42 x 32 cm

MATERIAUX ET ENTRETIEN

MATERIAUX

Acier, peinture époxy, polyéthylène, polyester, nylon.
Sangles et adhésifs de la marque VELCRO®.

ENTRETIEN

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel, adoucissant et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.



Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.
Sangles auto-agrippantes « velours » lavables à 30° ;
Sangles tissu lavables à 60°, séchage à 60°.

STOCKAGE ET MISE AU REBUT

STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température. Eviter l'exposition au soleil.

MISE AU REBUT

Vérifiez la disponibilité d'options de recyclage respectueuses de l'environnement et appliquez les dispositions légales nationales en vigueur. L'élimination du dispositif doit être effectuée conformément à la réglementation applicable.

SECURITE

SPECIFICATIONS

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical ou un professionnel de santé qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit. En cas d'évènement indésirable, consultez votre professionnel de santé.

Seuls les accessoires fournis par Alter Eco Santé sont compatibles avec nos dispositifs.

L'utilisation de nos produits avec tout autre aide technique ou dispositif médical, y compris de notre marque, doit être validé par un professionnel de santé pour assurer la sécurité du patient et du soignant.

CONTROLE PERIODIQUE

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualite@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

PRODUIT, ACCESSOIRES ET PIÈCES D'USURE

PRODUIT ET VARIANTES

référence	Identification UDI	Modèle	compatibilité	Poids	Dimensions
DEBARLI90	03760311370069	Barre standard.	Lit médicalisé ou à lattes.	2,35 kg	68 x 42 x 32 cm
DEBARLI140	03760311370076		Lit à sommier tapissier maxi.		
DEBARLI200	03760311370458		Lit à sommier tapissier maxi.		
DEBARCOUL90	03760311370472	Barre standard.	Lit médicalisé ou à lattes.	2,35 kg	68 x 42 x 32 cm
DEBARCOUL140	03760311370519		Lit à sommier tapissier largeur 140 cm maxi.		
DEBARCOUL200	03760311370496		Lit à sommier tapissier largeur 200 cm maxi.		
DEBARCOUL90.02	03760311370465	Barre standard.	Lit médicalisé ou à lattes.	2,35 kg	68 x 42 x 32 cm
DEBARCOUL140.02	03760311370502		Lit à sommier tapissier largeur 140 cm maxi.		
DEBARCOUL200.02	03760311370489		Lit à sommier tapissier largeur 200 cm maxi.		
DEHAUBAR90	03760311370342	Barre haute pour lit avec surmatelas.	Lit médicalisé ou à lattes.	2,55 kg	68 x 42 x 42 cm
DEHAUBAR140	03760311370366		Lit à sommier tapissier largeur 140 cm maxi.		
DEHAUBAR200	03760311370359		Lit à sommier tapissier largeur 200 cm maxi.		
DECLIBAR90	03760311370373	Barre escamotable.	Lit médicalisé ou à lattes.	2,35 kg	68 x 42 x 32 cm
DECLIBAR140	03760311370397		Lit à sommier tapissier largeur 140 cm maxi.		
DECLIBAR200	03760311370380		Lit à sommier tapissier largeur 200 cm maxi.		
DEBARLIDOU	03760311370441	Barre double réglable en	Lit médicalisé ou à lattes.	2,55 kg	93 à 123 x 42 x 32 cm
DEBARCLIDOU	03760311370540	Barre double et déclinable	Lit médicalisé ou à lattes.	2,55 kg	92 x 42 x 32 cm

Charge maximale admissible : 150kg.

ACCESSOIRES

Seuls les accessoires Alter Eco Santé sont autorisés pour l'utilisation du dispositif.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
N/A	N/A

PIECES D'USURE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
ZSANVELNC	Kit de fixation Sangles VELCRO et accroches pour ref 90
ZDEBARKIT140NC	Kit de fixation Sangles pour ref 140
ZDEBARKIT200NC	Kit de fixation Sangles pour ref 200

Seules les pièces d'origine fournies par le fabricant assurent la conformité du produit, le niveau de service et la sécurité exigés par le concepteur.

GARANTIE

2 ans hors pièces d'usure (6 mois). Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect préconisations d'entretien du fabricant.