



NOTICE D'UTILISATION

ESCABOLI®

SI21637



Version : A-2026
Date de Mise à Jour : 30/04/2026



Alter Eco Santé
7 impasse du Pradié 31270 Villeneuve Tolosane – France
05.34.46.03.76 – contact@alterecosante.net
www.alterecosante.net

NOTICE D'UTILISATION

Cette notice d'utilisation fournit les informations essentielles relatives à l'utilisation sûre et correcte du dispositif médical ESCABOLI®.
Elle doit être lue attentivement avant toute utilisation et conservée pour référence ultérieure.

Le dispositif médical cité est conforme aux exigences applicables du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

L'utilisateur est tenu de respecter les instructions, avertissements et précautions décrits dans ce document afin de garantir la sécurité du patient et des utilisateurs ainsi que la performance attendue du dispositif.

ESCABOLI® est un coussin multifonction étanche et rigide. Installé au pied du lit, il permet au patient de se rehausser dans son lit graduellement en toute autonomie. Laisse au pied du lit, il permet également de limiter le glissement au fond du lit.

Ce coussin multifonction peut aussi être utilisé par l'aidant comme suspension talonnière ou support de décubitus latéral afin de faciliter les soins ou la toilette tout en le préservant d'un effort.



Garantie : 2 ans hors pièces d'usure (6mois)

Fabricant : Alter Eco Santé

Origine : France

Classe du dispositif médical : Classe 1



SOMMAIRE

COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT	3
ETIQUETTE	3
SYMBOLES	3
DESTINATION DU DISPOSITIF	4
PERFORMANCE CLINIQUE	4
CONDITIONS D'UTILISATION PREVUES	4
UTILISATION	5
NOTICE DE MONTAGE ET DIMENSIONS	5
MATERIAUX ET ENTRETIEN	6
STOCKAGE ET MISE AU REBUT	6
SECURITE	6
PRODUIT, ACCESSOIRES ET PIECES D'USURE	7



COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT

ESCABOLI® se compose d'un bloc de mousse polyéthylène présentant différentes zones d'appui permettant de répondre aux différentes fonctions du produit.










CONDITIONNEMENT

ESCABOLI® est conditionné dans une enveloppe PE puis dans un carton individuel. Le produit peut être conditionné dans un carton de groupage en cas de commande multiple.

ETIQUETTE



SYMBOLES

	Fabricant		Référence catalogue
	Date de fabrication AAAA-MM-JJ (Année-Mois-Jour)		Numéro de lot
	Consultez la notice d'utilisation		Numéro d'identification UDI
	Dispositif médical		Marque CE
	Ne pas exposer à la lumière du soleil		



DESTINATION DU DISPOSITIF

INDICATIONS

Appuis destinés à compenser une faiblesse des membres inférieurs en position couchée de patients présentant, entre autres, des troubles tels que l'hémiplégie, l'akinésie, la désadaptation des schémas moteurs, une perte de contrôle des mouvements des membres inférieurs lors de la verticalisation comme l'hypertonie en extension des genoux, l'adduction, l'abduction.

Indiqué pour tout sujet présentant une difficulté de rehaussement autonome par faiblesse des membres inférieurs, hémiplégie, akinésie (maladie de Parkinson) ou désadaptation des schémas moteurs.

CONTRE INDICATIONS

Contre-indications

Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne jamais utiliser un produit défectueux.

Contre-indiqué pour les sujets présentant une hypotonie complète ou faiblesse musculaire importante des membres inférieurs ou un syndrome de régression psychomotrice. Contre-indiqué pour les sujets présentant une interdiction d'appui sur au moins un membre inférieur.

Effets secondaires

Le dispositif étant un dispositif médical non invasif, sans interaction biologique avec l'utilisateur, aucun effet secondaire direct n'est attendu lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions du fabricant.

Avertissements

Un contrôle périodique de l'état du produit est obligatoire.

Charge maximale admissible : 200 kg

UTILISATEURS

Personnel soignant, Aidant proche du sujet

PERFORMANCE CLINIQUE

Coussin permettant de faciliter le rehaussement au lit et le maintien d'une position fonctionnelle, en offrant un appui stable pour les membres inférieurs. Il favorise la participation active du patient, contribuant au maintien des capacités motrices résiduelles et à la prévention de la dépendance fonctionnelle.

CONDITIONS D'UTILISATION PREVUES

Coussin permettant de mettre à disposition du patient alité plusieurs zones d'appui afin de participer de façon autonome ou guidée à son rehaussement dans le lit ; coussin permettant au soignant de positionner la jambe du patient pour surélever celle-ci et décoller le talon du lit et de maintenir la position le temps d'un soin.

UTILISATION

REHAUSSEMENT AU LIT :

- Placer le produit sur le lit de façon à ce que la plus grande des largeurs soit contre le pied de lit.
- Dans le cas d'utilisation d'un drap de rehaussement, placer le drap de rehaussement ;
- Inviter le patient à placer ses pieds sur le pied de lit et à pousser sur ses jambes ;
- Inviter le patient à placer ses pieds sur la marche médiane de ESCABOLI® et à pousser sur ses jambes ;
- Inviter le patient à placer ses pieds sur la marche la plus étroite de ESCABOLI® et à pousser sur ses jambes ;
- Dans le cas d'utilisation d'un drap de rehaussement, retirer le drap de rehaussement.



ESCABOLI® peut être utilisé en combinaison avec un drap de rehaussement ou avec la potence de lit médicalisé. Demandez conseil à un professionnel de santé pour vous assurer de la compatibilité des produits entre eux.


SOIN DES PIEDS :

- Placer ESCABOLI® sur le lit, entre les jambes du patient, la plus grande largeur un peu au dessus du pli poplité ;
- Soulever la jambe voulue et la placer sur ESCABOLI® en ajustant le positionnement du coussin sous la jambe ;
- Le mollet doit poser à plat sur le plat de ESCABOLI® ; le pied doit être dégagé et libre de tout mouvement ;
- Retirer ESCABOLI® après le soin.

ESCABOLI® peut être utilisé en combinaison avec une alèse non tissée étanche afin de préserver le produit de salissures et de risque de contamination.

NOTICE DE MONTAGE ET DIMENSIONS

Dimensions :

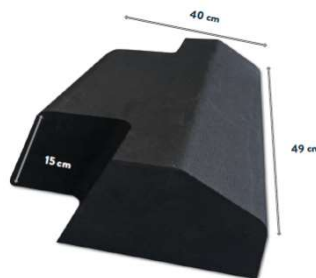

Montage : Produit monobloc sans montage.



MATERIAUX ET ENTRETIEN

MATERIAUX

Composant	Matière	Fonctionnalités
Bloc de mousse	Mousse de polyéthylène	Appui et maintien des membres inférieurs

ENTRETIEN

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés :

Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

Produit recommandé :

Détergent désinfectant surfaces hautes.

Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.

Compatible protocoles de bionettoyage et désinfection vapeur selon la norme NF T72-110 pour la désinfection à la vapeur (utilisation D-VAP PRISM).

STOCKAGE ET MISE AU REBUT

STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température. Eviter l'exposition au soleil.

MISE AU REBUT

Vérifiez la disponibilité d'options de recyclage respectueuses de l'environnement et appliquez les dispositions légales nationales en vigueur. L'élimination du dispositif doit être effectuée conformément à la réglementation applicable.

SECURITE

SPECIFICATIONS

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical ou un professionnel de santé qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit. En cas d'évènement indésirable, consultez votre professionnel de santé.

Seuls les accessoires fournis par Alter Eco Santé sont compatibles avec nos dispositifs.

L'utilisation de nos produits avec tout autre aide technique ou dispositif médical, y compris de notre marque, doit être validé par un professionnel de santé pour assurer la sécurité du patient et du soignant.



CONTROLE PERIODIQUE

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualite@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

PRODUIT, ACCESSOIRES ET PIECES D'USURE

PRODUIT ET VARIANTES

RÉFÉRENCE	N° IDENTIFICATION UDI	POIDS	AUTRE PRODUIT SELON
SI21637	03760311370946 376031137MOBICOACT6M	0.2 KG	N/A

Charge maximale admissible : 200 kg.

ACCESSOIRES

Seuls les accessoires Alter Eco Santé sont autorisés pour l'utilisation du dispositif.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
N/A	N/A

PIECES D'USURE

Seules les pièces d'origine fournies par le fabricant assurent la conformité du produit, le niveau de service et la sécurité exigés par le concepteur.

GARANTIE

2 ans hors pièces d'usure (6 mois). Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect préconisations d'entretien du fabricant.