



NOTICE D'UTILISATION

MOUSTACHE®

SI21635



Version : A-2026
Date de Mise à Jour : 30/04/2026



Alter Eco Santé
7 impasse du Pradié 31270 Villeneuve Tolosane – France
05.34.46.03.76 – contact@alterecosante.net
www.alterecosante.net

NOTICE D'UTILISATION

Cette notice d'utilisation fournit les informations essentielles relatives à l'utilisation sûre et correcte du dispositif médical MOUSTACHE®.
Elle doit être lue attentivement avant toute utilisation et conservée pour référence ultérieure.

Le dispositif médical cité est conforme aux exigences applicables du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

L'utilisateur est tenu de respecter les instructions, avertissements et précautions décrits dans ce document afin de garantir la sécurité du patient et des utilisateurs ainsi que la performance attendue du dispositif.

MOUSTACHE® est un appui tibial en mousse muni d'attaches rapides.
Il se place sur les tibias de l'aidé pour permettre le maintien axial des jambes (anti abduction et adduction) et garantir une stabilité lors du transfert.
L'aidant positionne son tibia dans l'encoche prévu à cet effet, assurant ainsi la gestion du centre de gravité.



Garantie : 2 ans hors pièces d'usure (6mois)
Fabricant : Alter Eco Santé
Origine : France
Classe du dispositif médical : Classe 1



SOMMAIRE

COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT	3
ETIQUETTE	3
SYMBOLES	3
DESTINATION DU DISPOSITIF	4
PERFORMANCE CLINIQUE	5
CONDITIONS D'UTILISATION PREVUES	5
UTILISATION	5
NOTICE DE MONTAGE ET DIMENSIONS	5
MATERIAUX ET ENTRETIEN	6
STOCKAGE ET MISE AU REBUT	6
SECURITE	6
PRODUIT, ACCESSOIRES ET PIECES D'USURE	7



COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT

MOUSTACHE® se compose d'un coussin en mousse polyéthylène et d'une sangle de maintien en bouclettes polyester équipée de deux embouts de finition de la marque VELCRO®.










CONDITIONNEMENT

MOUSTACHE® est conditionné dans une enveloppe PE puis dans un carton individuel sur mesure ou conditionné par 3 unités. Le conditionnement comprend la notice d'utilisation du produit.

ETIQUETTE



SYMBOLES

	Fabricant		Référence catalogue
	Date de fabrication AAAA-MM-JJ (Année-Mois-Jour)		Numéro de lot
	Consultez la notice d'utilisation		Numéro d'identification UDI
	Dispositif médical		Marque CE
	Ne pas exposer à la lumière du soleil		



DESTINATION DU DISPOSITIF

INDICATIONS

Appuis destinés à compenser une faiblesse des membres inférieurs en position couchée ou debout de patients présentant, entre autres, des troubles tels que l'hémiplégie, l'akinésie, la désadaptation des schémas moteurs, une perte de contrôle des mouvements des membres inférieurs lors de la verticalisation comme l'hypertonie en extension des genoux, l'adduction, l'abduction.

Manutention manuelle par une tierce personne, entre deux positions assises, d'un sujet présentant une incapacité de verticalisation autonome. Indiqué pour les sujets présentant une faiblesse musculaire modérée des membres inférieurs (force des quadriceps supérieure ou égale à 3/5).

Indiqué pour les sujets présentant un déficit de contrôle des mouvements des membres inférieurs lors de la verticalisation (hypertonie en extension des genoux, adduction, abduction de hanche).

Indiqué pour les premiers transferts post opératoire des personnes présentant une prothèse de hanche (en association avec un disque pivotant). Il est recommandé d'utiliser le dispositif en association avec une ceinture OLIVIA[®] placée sur l'aidant (pour les patients ayant une capacité de préhension). Il est recommandé d'utiliser le dispositif en association avec un disque pivotant.

CONTRE INDICATIONS

Contre-indications

Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne jamais utiliser un produit défectueux.

Contre-indiqué pour les sujets présentant une hypotonie complète ou faiblesse musculaire importante des membres inférieurs ou un syndrome de régression psychomotrice. Contre-indiqué pour les sujets présentant une interdiction d'appui sur au moins un membre inférieur.

Effets secondaires

Le dispositif étant un dispositif médical non invasif, sans interaction biologique avec l'utilisateur, aucun effet secondaire direct n'est attendu lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions du fabricant.

Avertissements

Un contrôle périodique de l'état du produit est obligatoire.

Charge maximale admissible : 130 kg

UTILISATEURS

Personnel soignant, Aidant proche du sujet

PERFORMANCE CLINIQUE

- Contribue à la stabilisation des membres inférieurs et au contrôle des mouvements en abduction/adduction, favorisant ainsi un alignement biomécanique adapté lors de la verticalisation et des transferts assistés.
- Cf *PEC04 Appuis Plan d'évaluation clinique* et *RECO4 Appuis Rapport d'évaluation clinique*

CONDITIONS D'UTILISATION PREVUES

Coussin en mousse rigide permettant le maintien dans l'axe des membres inférieurs et permettant un positionnement idéal de l'accompagnant vis-à-vis du patient

UTILISATION

- Placer le produit sur le patient en plaçant le haut de ses tibias dans les deux encoches, puis passer la sangle en bouclette derrière ses mollets ;
- Sans serrer la jambe du patient, tendre la sangle en bouclette et l'appuyer sur les zones de crochet de chaque côté du produit
- Vérifiez que les sièges à roue ou roulettes sont freinés, actionnez les freins avant toute autre opération ;
- Décaler le pied du patient vers l'avant pour favoriser le pivot. Si vous pivotez vers la droite, avancez la jambe gauche du patient ;
- Placez votre tibia dans l'encoche de votre côté ; votre pied doit être entre ceux du patient.
- Faites une fente avant pour venir saisir le patient ; faites une fente arrière pour l'entraîner vers vous et le verticaliser ;
- Pivotez et faites une fente avant pour assoir le patient sur son assise de destination.
- Dégagez la sangle bouclette de l'arrière des jambes du patient et enlevez le produit.



MOUSTACHE® peut être utilisé en combinaison avec un disque pivotant et/ou une ceinture de transfert abdominale. Demandez conseil à un professionnel de santé pour vous assurer de la compatibilité des produits entre eux.

NOTICE DE MONTAGE ET DIMENSIONS

Dimensions : 44,5 x 23 x 9 cm

Montage : Produit livré monté.



MATERIAUX ET ENTRETIEN

MATERIAUX

Composant	Matière	Fonctionnalités
Bloc de mousse	Mousse de polyéthylène	Appui et maintien des membres inférieurs
Sangle	Velours polyester	Maintien du produit sur le patient

ENTRETIEN

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés :

Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

Produit recommandé :

Détergent désinfectant surfaces hautes.

Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.

Compatible protocoles de bionettoyage et désinfection vapeur selon la norme NF T72-110 pour la désinfection à la vapeur (utilisation D-VAP PRISM).

STOCKAGE ET MISE AU REBUT

STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température. Eviter l'exposition au soleil.

MISE AU REBUT

Vérifiez la disponibilité d'options de recyclage respectueuses de l'environnement et appliquez les dispositions légales nationales en vigueur. L'élimination du dispositif doit être effectuée conformément à la réglementation applicable.

SECURITE

SPECIFICATIONS

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical ou un professionnel de santé qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit. En cas d'évènement indésirable, consultez votre professionnel de santé.

Seuls les accessoires fournis par Alter Eco Santé sont compatibles avec nos dispositifs.

L'utilisation de nos produits avec tout autre aide technique ou dispositif médical, y compris de notre marque, doit être validé par un professionnel de santé pour assurer la sécurité du patient et du soignant.



CONTROLE PERIODIQUE

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualite@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

PRODUIT, ACCESSOIRES ET PIECES D'USURE

PRODUIT ET VARIANTES

RÉFÉRENCE	N° IDENTIFICATION UDI	POIDS	AUTRE PRODUIT SELON
SI21635	03760311370953 376031137TRACASDEBA7	0.2 KG	N/A

Charge maximale admissible : 130 kg.

ACCESSOIRES

Seuls les accessoires Alter Eco Santé sont autorisés pour l'utilisation du dispositif.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
N/A	N/A

PIECES D'USURE

Seules les pièces d'origine fournies par le fabricant assurent la conformité du produit, le niveau de service et la sécurité exigés par le concepteur.

GARANTIE

2 ans hors pièces d'usure (6 mois). Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect préconisations d'entretien du fabricant.