



# NOTICE D'UTILISATION

## MEDITRANS®

SI21300



Version : A-2026  
Date de Mise à Jour : 06/05/2026



Alter Eco Santé  
7 impasse du Pradié 31270 Villeneuve Tolosane – France  
05.34.46.03.76 – [contact@alterecosante.net](mailto:contact@alterecosante.net)  
[www.alterecosante.net](http://www.alterecosante.net)



## NOTICE D'UTILISATION

Cette notice d'utilisation fournit les informations essentielles relatives à l'utilisation sûre et correcte du dispositif médical MEDITRANS®.

Elle doit être lue attentivement avant toute utilisation et conservée pour référence ultérieure.

Le dispositif médical cité est conforme aux exigences applicables du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

L'utilisateur est tenu de respecter les instructions, avertissements et précautions décrits dans ce document afin de garantir la sécurité du patient et des utilisateurs ainsi que la performance attendue du dispositif.

placée entre deux plans couchés, sert de passerelle et permet de transférer un patient par glissement à l'aide d'un drap de translation, préservant ainsi l'aidant d'un effort.



Garantie : 2 ans hors pièces d'usure (6mois)  
Fabricant : Alter Eco Santé  
Origine : France  
Classe du dispositif médical : Classe 1



COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT .....	3
ETIQUETTE .....	3
SYMBOLES .....	3
DESTINATION DU DISPOSITIF .....	3
PERFORMANCE CLINIQUE .....	4
CONDITIONS D'UTILISATION PREVUES .....	4
UTILISATION .....	4
NOTICE DE MONTAGE ET DIMENSIONS .....	4
MATERIAUX ET ENTRETIEN .....	5
STOCKAGE ET MISE AU REBUT .....	5
SECURITE .....	5
PRODUIT, ACCESSOIRES ET PIECES D'USURE .....	6

## COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT

Polyéthylène monobloc










### CONDITIONNEMENT

1 Enveloppe cartonnée antichoc et sa notice d'utilisation

## ETIQUETTE

Insérer l'étiquette produit faite par la Logistique une fois validée par la Qualité

## SYMBOLES

	Fabricant		Référence catalogue
	Date de fabrication AAAA-MM-JJ (Année-Mois-Jour)		Numéro de série
	Consultez la notice d'utilisation		Numéro d'identification UDI
	Dispositif médical		Marque CE
	Préserver du rayonnement solaire		

## DESTINATION DU DISPOSITIF

### INDICATIONS

Manutention manuelle par une tierce personne, entre deux plans horizontaux, d'un sujet présentant une incapacité de bouger. La planche de transfert MEDITRANS® sert de passerelle sur laquelle le sujet peut être transféré.

### CONTRE INDICATIONS

Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.



Ne jamais utiliser un produit défectueux.

Ne pas utiliser un matériel détérioré.

Ne pas laisser au sol après usage.

Ne pas laisser le patient de façon prolongée sur le produit.

## UTILISATEURS

- Personnel soignant
- Les ambulanciers (pompiers ou autres)
- Les brancardiers
- Les opérateurs d'imagerie,
- Les personnels urgentistes,
- Les aides-soignants
- Les infirmiers

## AVERTISSEMENT

**Ne pas utiliser le produit en dessous de -20°C (risque de casse).**

## PERFORMANCE CLINIQUE

Non applicable

- Cf *PEC05 Matelas Plan d'évaluation clinique* et *REC05 Matelas Rapport d'évaluation clinique*

## CONDITIONS D'UTILISATION PREVUES

Placée entre deux plans couchés, sert de passerelle et permet de transférer un patient par glissement, préservant ainsi l'aidant d'un effort. Sert de passerelle sur laquelle le sujet peut être transféré.

## UTILISATION

Rapprocher le plus possible les mobiliers entre lesquels le transfert va avoir lieu. Placer MEDITRANS® entre le plan de départ et le plan d'arrivée du transfert à réaliser. Utilisez l'aide technique de votre choix pour la réalisation du transfert, et la faire passer sur MEDITRANS® Retirer et ranger MEDITRANS® une fois le transfert réalisé.

## NOTICE DE MONTAGE ET DIMENSIONS

MEDITRANS® ne nécessite pas de montage.

Dimensions : 170 x 49 x 0.5 cm





## MATERIAUX ET ENTRETIEN

Polyéthylène haute densité

### ENTRETIEN

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.

Nettoyage et désinfection par vaporisation et essuyage d'un détergent désinfectant de surface haute de pH neutre. Peut être nettoyée au savon et à l'eau tiède.

Compatible protocoles de bionettoyage et désinfection vapeur selon la norme NF T72-110 pour la désinfection à la vapeur (utilisation D-VAP PRISM).

## STOCKAGE ET MISE AU REBUT

### STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température. Eviter l'exposition au soleil. **Ne pas utiliser le produit en dessous de -20°C (risque de casse).**

### MISE AU REBUT

Vérifiez la disponibilité d'options de recyclage respectueuses de l'environnement et appliquez les dispositions légales nationales en vigueur. L'élimination du dispositif doit être effectuée conformément à la réglementation applicable.

## SECURITE

### SPECIFICATIONS

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical ou un professionnel de santé qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit. En cas d'évènement indésirable, consultez votre professionnel de santé.

Seuls les accessoires fournis par Alter Eco Santé sont compatibles avec nos dispositifs.

L'utilisation de nos produits avec tout autre aide technique ou dispositif médical, y compris de notre marque, doit être validé par un professionnel de santé pour assurer la sécurité du patient et du soignant.

### CONTROLE PERIODIQUE

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualite@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



## PRODUIT, ACCESSOIRES ET PIÈCES D'USURE

### PRODUIT ET VARIANTES

RÉFÉRENCE	N° IDENTIFICATION UDI	POIDS	DESCRIPTION
<b>SI21300</b>	03760311371035	4,2 kg	Planche de transfert MEDITRANS®

**Charge maximale admissible : 120 kg.**

### ACCESSOIRES

Seuls les accessoires Alter Eco Santé sont autorisés pour l'utilisation du dispositif.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
<b>SI21301</b>	Lot de 16 patins antidérapants

### PIÈCES D'USURE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
<b>SI21301</b>	Lot de 16 patins antidérapants

Seules les pièces d'origine fournies par le fabricant assurent la conformité du produit, le niveau de service et la sécurité exigés par le concepteur.

### GARANTIE

2 ans hors pièces d'usure (6 mois). Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect préconisations d'entretien du fabricant.