



NOTICE D'UTILISATION

TRANSALT®

SI2600
SI21650N
SI21700



Version : A-2026
Date de Mise à Jour : 06/05/2026



Alter Eco Santé
7 impasse du Pradié 31270 Villeneuve Tolosane – France
05.34.46.03.76 – contact@alterecosante.net
www.alterecosante.net

NOTICE D'UTILISATION

Cette notice d'utilisation fournit les informations essentielles relatives à l'utilisation sûre et correcte du dispositif médical TRANSALT®.
Elle doit être lue attentivement avant toute utilisation et conservée pour référence ultérieure.

Le dispositif médical cité est conforme aux exigences applicables du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

L'utilisateur est tenu de respecter les instructions, avertissements et précautions décrits dans ce document afin de garantir la sécurité du patient et des utilisateurs ainsi que la performance attendue du dispositif.

TRANSALT® est un matelas de transfert qui se compose d'une face glissante côté brancard et d'une face capitonnée côté patient, et de 12 poignées. Associé à un brancard, il apporte du confort au patient et permet une translation en toute sécurité. Les soignants déplacent le patient, d'un brancard à un plan horizontal, allongé sur le matelas en tractant les poignées. Il est aimantique et radio transparent.
Il existe en trois versions : rigide, semi-rigide et souple. Le modèle souple est utilisable dans un matelas coquille, se roule et s'intègre parfaitement dans l'équipement des ambulances de type B.



Garantie : 2 ans hors pièces d'usure (6mois)
Fabricant : Alter Eco Santé
Origine : France
Classe du dispositif médical : Classe 1



COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT	3
ETIQUETTE	3
SYMBOLES	3
DESTINATION DU DISPOSITIF	3
PERFORMANCE CLINIQUE	4
CONDITIONS D'UTILISATION PREVUES	4
UTILISATION	4
NOTICE DE MONTAGE ET DIMENSIONS	4
MATERIAUX ET ENTRETIEN	5
STOCKAGE ET MISE AU REBUT	5
SECURITE	5
PRODUIT, ACCESSOIRES ET PIECES D'USURE	5

COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT

1 matelas de transfert TRANSALT®










CONDITIONNEMENT

1 carton et sa notice d'utilisation

ETIQUETTE

Insérer l'étiquette produit faite par la Logistique une fois validée par la Qualité

SYMBOLES

	Fabricant		Référence catalogue
	Date de fabrication AAAA-MM-JJ (Année-Mois-Jour)		Numéro de série
	Consultez la notice d'utilisation		Numéro d'identification UDI
	Dispositif médical		Marque CE
	Préserver du rayonnement solaire		

DESTINATION DU DISPOSITIF

INDICATIONS

Manutention manuelle par une tierce personne, pour un transfert allongé, d'un sujet présentant une incapacité de bouger ou lors de la prise en charge au service des urgences, jusque dans les services d'imagerie.

CONTRE INDICATIONS

Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.

Ne jamais utiliser un produit défectueux.

Après utilisation, le matelas de transfert TRANSALT® ne doit pas rester sur le sol.

Ne pas plier le matelas de transfert TRANSALT® SI21600 de plus de 30°.

Ne pas laisser le patient de façon prolongée sur le produit

UTILISATEURS

- Personnel soignant
- Les ambulanciers (pompiers ou autres)
- Les brancardiers
- Les opérateurs d'imagerie,
- Les personnels urgentistes,
- Les aides-soignants
- Les infirmiers

PERFORMANCE CLINIQUE

Non applicable

- Cf *PEC05 Matelas Plan d'évaluation clinique* et *REC05 Matelas Rapport d'évaluation clinique*

CONDITIONS D'UTILISATION PREVUES

Associé à un brancard, il apporte du confort au patient et permet une translation en toute sécurité. Les soignants déplacent le patient, d'un brancard à un plan horizontal, allongé sur le matelas en tractant les poignées.

La face adhérente étiquetée **DESSUS** doit être côté patient et la face glissante côté brancard. Possibilité de positionner une alèse entre le brancard et le matelas de transfert TRANSALT® pour éviter un effet « ventouse ».

UTILISATION

Transférer le patient sur le matelas de transfert avec l'aide technique de votre choix. TRANSALT® Fournit un matelas supplémentaire sur lequel est positionné le patient en décubitus dorsal, permettant d'effectuer le transfert entre deux plans sans mobiliser le patient, mais en manipulant uniquement le dispositif.

NOTICE DE MONTAGE ET DIMENSIONS

Aucun montage n'est nécessaire.





MATERIAUX ET ENTRETIEN

MATERIAUX

Polyester, Polyéthylène haute densité, PVC, Risptop (nylon), Dickson

ENTRETIEN

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes par trempage ou aspersion

Peut être nettoyée au savon et à l'eau tiède. Compatible protocoles de bionettoyage et désinfection vapeur selon la norme NF T72-110 pour la désinfection à la vapeur (utilisation D-VAP PRISM).

STOCKAGE ET MISE AU REBUT

STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température. Eviter l'exposition au soleil.

MISE AU REBUT

Vérifiez la disponibilité d'options de recyclage respectueuses de l'environnement et appliquez les dispositions légales nationales en vigueur. L'élimination du dispositif doit être effectuée conformément à la réglementation applicable.

SECURITE

SPECIFICATIONS

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical ou un professionnel de santé qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit. En cas d'évènement indésirable, consultez votre professionnel de santé.

Seuls les accessoires fournis par Alter Eco Santé sont compatibles avec nos dispositifs.

L'utilisation de nos produits avec tout autre aide technique ou dispositif médical, y compris de notre marque, doit être validé par un professionnel de santé pour assurer la sécurité du patient et du soignant.

CONTROLE PERIODIQUE

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualite@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

PRODUIT, ACCESSOIRES ET PIECES D'USURE

PRODUIT ET VARIANTES



RÉFÉRENCE	N° IDENTIFICATION UDI	POIDS	DESCRIPTION
SI21600	03760311371004	4 kg	Matelas de transfert TRANSALT® rigide non feu
SI21650N	03760311370922	3 kg	Matelas de transfert TRANSALT® semi rigide non feu
SI21700	03760311370908	4 kg	Matelas de transfert TRANSALT® souple non feu

Charge maximale admissible : 130 kg.

ACCESSOIRES

Seuls les accessoires Alter Eco Santé sont autorisés pour l'utilisation du dispositif.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
N/A	N/A

PIECES D'USURE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
N/A	N/A

Seules les pièces d'origine fournies par le fabricant assurent la conformité du produit, le niveau de service et la sécurité exigés par le concepteur.

GARANTIE

2 ans hors pièces d'usure (6 mois). Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect préconisations d'entretien du fabricant.