



NOTICE D'UTILISATION

TRANSALTO®

SI21750AD
SI21750G



Version : A-2026
Date de Mise à Jour : 06/05/2026



Alter Eco Santé
7 impasse du Pradié 31270 Villeneuve Tolosane – France
05.34.46.03.76 – contact@alterecosante.net
www.alterecosante.net



NOTICE D'UTILISATION

Cette notice d'utilisation fournit les informations essentielles relatives à l'utilisation sûre et correcte du dispositif médical TRANSALTO®.
Elle doit être lue attentivement avant toute utilisation et conservée pour référence ultérieure.

Le dispositif médical cité est conforme aux exigences applicables du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

L'utilisateur est tenu de respecter les instructions, avertissements et précautions décrits dans ce document afin de garantir la sécurité du patient et des utilisateurs ainsi que la performance attendue du dispositif.

TRANSALTO® est un matelas de transfert amagnétique et radiotransparent équipé de 12 poignées. Il ne comporte aucune couture facilitant la désinfection. Étanche, la mousse de garniture ne peut pas être souillée.

Associé à un brancard, il apporte du confort au patient et permet une translation en toute sécurité. Les soignants déplacent le patient, d'un brancard à un plan horizontal, allongé sur le matelas en tractant les poignées.

Il est amagnétique et radiotransparent.

Il existe en deux versions : en fonction du besoin, la version dessus antidérapant, évite au patient de glisser en position semi allongée à l'inverse la version dessus glissant, facilite la dépose du patient. La face orange se place côté brancard.



Garantie : 2 ans hors pièces d'usure (6mois)
Fabricant : Alter Eco Santé
Origine : France
Classe du dispositif médical : Classe 1



COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT	3
ETIQUETTE	3
SYMBOLES	3
DESTINATION DU DISPOSITIF	3
PERFORMANCE CLINIQUE	4
CONDITIONS D'UTILISATION PREVUES	4
UTILISATION	4
NOTICE DE MONTAGE ET DIMENSIONS	4
MATERIAUX ET ENTRETIEN	5
STOCKAGE ET MISE AU REBUT	5
SECURITE	5
PRODUIT, ACCESSOIRES ET PIECES D'USURE	6



COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT

1 matelas de transfert TRANSALTO®




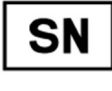





CONDITIONNEMENT

1 carton et sa notice d'utilisation

ETIQUETTE

Insérer l'étiquette produit faite par la Logistique une fois validée par la Qualité

SYMBOLES

	Fabricant		Référence catalogue
	Date de fabrication AAAA-MM-JJ (Année-Mois-Jour)		Numéro de série
	Consultez la notice d'utilisation		Numéro d'identification UDI
	Dispositif médical		Marque CE
	Préserver du rayonnement solaire		

DESTINATION DU DISPOSITIF

INDICATIONS

Manutention manuelle par une tierce personne, pour un transfert allongé, d'un sujet présentant une incapacité de bouger ou lors de la prise en charge au service des urgences, jusque dans les services d'imagerie.

CONTRE INDICATIONS

Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.



Ne jamais utiliser un produit défectueux.

Après utilisation, le matelas de transfert TRANSALTO® ne doit pas rester sur le sol.

Ne pas laisser le patient de façon prolongée sur le matelas.

UTILISATEURS

- Personnel soignant
- Les ambulanciers (pompiers ou autres)
- Les brancardiers
- Les opérateurs d'imagerie,
- Les personnels urgentistes,
- Les aides-soignants
- Les infirmiers

PERFORMANCE CLINIQUE

Non applicable

- Cf *PEC05 Matelas Plan d'évaluation clinique* et *REC05 Matelas Rapport d'évaluation clinique*

CONDITIONS D'UTILISATION PREVUES

Associé à un brancard, il apporte du confort au patient et permet une translation en toute sécurité. Les soignants déplacent le patient, d'un brancard à un plan horizontal, allongé sur le matelas en tractant les poignées. Pour la manutention de patients de plus de 90 kg, il est préférable d'utiliser un drap de transfert ou de rehaussement. La traction par deux opérateurs est recommandée. Il est recommandé de couvrir le brancard d'un drap en coton pour supprimer tout risque d'adhérence avec le produit.

UTILISATION

Transférer le patient sur le matelas de transfert avec l'aide technique de votre choix. TRANSALTO® Fournit un matelas supplémentaire sur lequel est positionné le patient en décubitus dorsal, permettant d'effectuer le transfert entre deux plans sans mobiliser le patient, mais en manipulant uniquement le dispositif.

NOTICE DE MONTAGE ET DIMENSIONS

Aucun montage n'est nécessaire





MATERIAUX ET ENTRETIEN

MATERIAUX

Polyester, PVC, Polyéthylène.

ENTRETIEN

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes par vaporisation et essuyage.

Les surfaces sont étudiées pour laisser le moins d'angles inaccessibles possible. Il peut être lavé à l'éponge et à l'eau savonneuse tiède, puis essuyé à la raclette. Ne pas laver en machine ou en autoclave. Ne pas sécher en machine. Ne pas repasser.

Compatible protocoles de bionettoyage et désinfection vapeur selon la norme NF T72-110 pour la désinfection à la vapeur (utilisation D-VAP PRISM).

STOCKAGE ET MISE AU REBUT

STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température. Eviter l'exposition au soleil.

MISE AU REBUT

Vérifiez la disponibilité d'options de recyclage respectueuses de l'environnement et appliquez les dispositions légales nationales en vigueur. L'élimination du dispositif doit être effectuée conformément à la réglementation applicable.

SECURITE

SPECIFICATIONS

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical ou un professionnel de santé qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit. En cas d'évènement indésirable, consultez votre professionnel de santé.

Seuls les accessoires fournis par Alter Eco Santé sont compatibles avec nos dispositifs.

L'utilisation de nos produits avec tout autre aide technique ou dispositif médical, y compris de notre marque, doit être validé par un professionnel de santé pour assurer la sécurité du patient et du soignant.

CONTROLE PERIODIQUE

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualite@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



PRODUIT, ACCESSOIRES ET PIÈCES D'USURE

PRODUIT ET VARIANTES

RÉFÉRENCE	N° IDENTIFICATION UDI	POIDS	DESCRIPTION
SI21750AD	03760311370786	3.9 kg	Matelas de transfert TRANSALTO® semi-rigide. Dessus antidérapant
SI21750G	03760311370779	3.9 kg	Matelas de transfert TRANSALTO® semi-rigide. Dessus glissant

Charge maximale admissible : 200 kg.

ACCESSOIRES

Seuls les accessoires Alter Eco Santé sont autorisés pour l'utilisation du dispositif.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
N/A	N/A

PIÈCES D'USURE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
N/A	N/A

Seules les pièces d'origine fournies par le fabricant assurent la conformité du produit, le niveau de service et la sécurité exigés par le concepteur.

GARANTIE

2 ans hors pièces d'usure (6 mois). Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect préconisations d'entretien du fabricant.