



# NOTICE D'UTILISATION

EMMA®

SI21330



Version : A-2026  
Date de Mise à Jour : 07/05/2026



Alter Eco Santé  
7 impasse du Pradié 31270 Villeneuve Tolosane – France  
05.34.46.03.76 – [contact@alterecosante.net](mailto:contact@alterecosante.net)  
[www.alterecosante.net](http://www.alterecosante.net)

## NOTICE D'UTILISATION

Cette notice d'utilisation fournit les informations essentielles relatives à l'utilisation sûre et correcte du dispositif médical EMMA®.  
Elle doit être lue attentivement avant toute utilisation et conservée pour référence ultérieure.

Le dispositif médical cité est conforme aux exigences applicables du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

L'utilisateur est tenu de respecter les instructions, avertissements et précautions décrits dans ce document afin de garantir la sécurité du patient et des utilisateurs ainsi que la performance attendue du dispositif.

**EMMA®** est une ceinture de transfert ajustable composée de 6 poignées obliques, strictement **réservée à un usage à domicile**.

Elle peut être portée par l'aidant ou l'aidé. Sa face interne antidérapante assure un maintien optimal au niveau de la taille et évite tous risques de glissement.

Ses prises ergonomiques respectent la pince naturelle de la main rassurant l'aidé et protégeant l'aidant des agrippements paradoxaux.



Garantie : 2 ans hors pièces d'usure (6mois)  
Fabricant : Alter Eco Santé  
Origine : France  
Classe du dispositif médical : Classe 1



COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT .....	3
ETIQUETTE .....	3
SYMBOLES .....	3
DESTINATION DU DISPOSITIF .....	3
PERFORMANCE CLINIQUE .....	4
CONDITIONS D'UTILISATION PREVUES .....	4
UTILISATION .....	4
NOTICE DE MONTAGE ET DIMENSIONS .....	5
MATERIAUX ET ENTRETIEN .....	5
STOCKAGE ET MISE AU REBUT .....	5
SECURITE .....	5
PRODUIT, ACCESSOIRES ET PIECES D'USURE .....	6




## COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT

1 Ceinture EMMA®

### CONDITIONNEMENT

1 sac PE dans un emballage carton et sa notice d'utilisation.

## ETIQUETTE

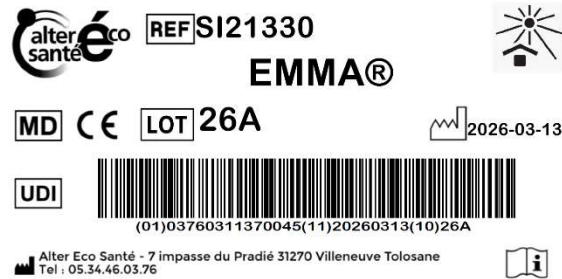

## SYMBOLES

	Fabricant		Référence catalogue
	Date de fabrication AAAA-MM-JJ (Année-Mois-Jour)		Numéro de lot
	Consultez la notice d'utilisation		Numéro d'identification UDI
	Dispositif médical		Marque CE
	Protéger du rayonnement du soleil		

## DESTINATION DU DISPOSITIF

### INDICATIONS

Manutention manuelle par une tierce personne, à domicile, pour aider et sécuriser les transferts, la marche, le lever ou le redressement d'un sujet tombé au sol.

## CONTRE INDICATIONS

Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Après utilisation, la ceinture EMMA® ne doit pas rester sur le sol.

Ne pas utiliser un produit décousu ou présentant un défaut de la boucle.

Ne pas porter ou faire porter la ceinture de façon prolongée ou permanente.

Non approprié pour un usage intensif en collectivité.

Ne pas remplacer la boucle par un produit équivalent non fourni par ALTER ECO SANTE .

## UTILISATEURS

- Personnel soignant
- Aidant proche du sujet

## PERFORMANCE CLINIQUE

Les dispositifs de la gamme Sangles et Ceintures (ELINGUE®, EMMA®, POULIE® et BILINGUE®) sont des dispositifs médicaux de classe I, non invasifs, dont le mode d'action repose exclusivement sur des principes mécaniques de transmission et de répartition des forces appliquées par un aidant lors des mobilisations.

Ces dispositifs n'exercent aucune action thérapeutique, pharmacologique, immunologique ou métabolique sur l'organisme. Ils n'interagissent pas avec des fonctions physiologiques critiques et n'induisent pas d'effet biologique direct. Leur action se limite à une assistance externe à la mobilisation, sans modification des paramètres cliniques intrinsèques du patient.

Dans ce contexte, la notion de performance clinique, définie comme la capacité du dispositif à produire un effet médical direct sur l'état clinique ou la santé du patient, n'est pas applicable.

- Cf *PEC06 Sangle Plan d'évaluation clinique* et *REC06 Sangle Rapport d'évaluation clinique*

## CONDITIONS D'UTILISATION PREVUES

Peut être positionnée sur le sujet ou sur l'aidant.

## UTILISATION

Placer la ceinture sur le haut du bassin et bien la serrer.

Si le patient porte la ceinture, amener le patient à l'appuyer sur les poignées inclinées de la ceinture.

Si le patient porte la ceinture, privilégier une prise à une main au niveau des poignées au milieu du dos du patient pour le guider plus facilement. Le rassurer en lui proposant alors de s'appuyer sur votre main disponible, ou en l'accompagnant au niveau des épaules.





## NOTICE DE MONTAGE ET DIMENSIONS

La ceinture EMMA® ne nécessite pas de montage.

Dimensions : 130 x 13 cm

Nombre de poignées : 6

Ajustable de taille 42 à 64.

## MATERIAUX ET ENTRETIEN

### MATERIAUX

Polyester enduction PVC, Polypropylène, PVC, Polyester, Nylon, Polyuréthane

### ENTRETIEN

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.

- Lavage à 30° en machine.
- Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.
- Compatible protocoles de bionettoyage et désinfection vapeur selon la norme NF T72-110 pour la désinfection à la vapeur (utilisation D-VAP PRISM).

## STOCKAGE ET MISE AU REBUT

### STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température. Eviter l'exposition au soleil.

### MISE AU REBUT

Vérifiez la disponibilité d'options de recyclage respectueuses de l'environnement et appliquez les dispositions légales nationales en vigueur. L'élimination du dispositif doit être effectuée conformément à la réglementation applicable.

## SECURITE

### SPECIFICATIONS

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical ou un professionnel de santé qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit. En cas d'évènement indésirable, consultez votre professionnel de santé.

Seuls les accessoires fournis par Alter Eco Santé sont compatibles avec nos dispositifs.

L'utilisation de nos produits avec tout autre aide technique ou dispositif médical, y compris de notre marque, doit être validé par un professionnel de santé pour assurer la sécurité du patient et du soignant.



## CONTROLE PERIODIQUE

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualite@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

## PRODUIT, ACCESSOIRES ET PIECES D'USURE

### PRODUIT ET VARIANTES

RÉFÉRENCE	N° IDENTIFICATION UDI	POIDS	DESCRIPTION
S121330	03760311370045	300 g	Ceinture de transfert EMMA® taille unique (t.42 à 64)

**Charge maximale admissible : 150kg.**

### ACCESSOIRES

Seuls les accessoires Alter Eco Santé sont autorisés pour l'utilisation du dispositif.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
N/A	N/A

### PIECES D'USURE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
N/A	N/A

Seules les pièces d'origine fournies par le fabricant assurent la conformité du produit, le niveau de service et la sécurité exigés par le concepteur.

### GARANTIE

2 ans hors pièces d'usure (6 mois). Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect préconisations d'entretien du fabricant.