



NOTICE D'UTILISATION

POULIE®

SI21680



Version : A-2026
Date de Mise à Jour : 07/05/2026



Alter Eco Santé
7 impasse du Pradié 31270 Villeneuve Tolosane – France
05.34.46.03.76 – contact@alterecosante.net
www.alterecosante.net

NOTICE D'UTILISATION

Cette notice d'utilisation fournit les informations essentielles relatives à l'utilisation sûre et correcte du dispositif médical POULIE®.
Elle doit être lue attentivement avant toute utilisation et conservée pour référence ultérieure.

Le dispositif médical cité est conforme aux exigences applicables du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

L'utilisateur est tenu de respecter les instructions, avertissements et précautions décrits dans ce document afin de garantir la sécurité du patient et des utilisateurs ainsi que la performance attendue du dispositif.

POULIE® est une sangle de rehaussement au lit. Elle se compose d'une sangle avec une poignée à chaque extrémité et d'un fourreau. Attachée à la tête de lit ou directement sur le sommier, elle permet de faciliter le rehaussement. Le fourreau se place au niveau du fessier et permet à l'aidant d'effectuer le geste du tir à la corde pour rehausser la personne, se préservant ainsi d'un effort.



Garantie : 2 ans hors pièces d'usure (6mois)
Fabricant : Alter Eco Santé
Origine : France
Classe du dispositif médical : Classe 1



COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT	3
ETIQUETTE	3
SYMBOLES	3
DESTINATION DU DISPOSITIF	3
PERFORMANCE CLINIQUE	4
CONDITIONS D'UTILISATION PREVUES	4
UTILISATION	4
NOTICE DE MONTAGE ET DIMENSIONS	5
MATERIAUX ET ENTRETIEN	5
STOCKAGE ET MISE AU REBUT	5
SECURITE	5
PRODUIT, ACCESSOIRES ET PIECES D'USURE	6



COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT

1 sangle poulie composée de son fourreau et de sa sangle. Livré assemblé.










CONDITIONNEMENT

1 sac PE avec sa notice d'utilisation

ETIQUETTE



SYMBOLES

	Fabricant		Référence catalogue
	Date de fabrication AAAA-MM-JJ (Année-Mois-Jour)		Numéro de lot
	Consultez la notice d'utilisation		Numéro d'identification UDI
	Dispositif médical		Marque CE
	Protéger du rayonnement du soleil		

DESTINATION DU DISPOSITIF

INDICATIONS

Manutention manuelle par une tierce personne d'un sujet présentant une faible capacité de participation au rehaussement au lit ou une surcharge pondérale importante.

CONTRE INDICATIONS

Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.

Après utilisation, la sangle POULIE® ne doit pas rester sur le sol ni dans le lit.

Ne pas approcher d'une flamme ou d'une source de chaleur importante

UTILISATEURS

- Personnel soignant
- Aidant proche du sujet

PERFORMANCE CLINIQUE

Les dispositifs de la gamme Sangles et Ceintures (ELINGUE®, EMMA®, POULIE® et BILINGUE®) sont des dispositifs médicaux de classe I, non invasifs, dont le mode d'action repose exclusivement sur des principes mécaniques de transmission et de répartition des forces appliquées par un aidant lors des mobilisations.

Ces dispositifs n'exercent aucune action thérapeutique, pharmacologique, immunologique ou métabolique sur l'organisme. Ils n'interagissent pas avec des fonctions physiologiques critiques et n'induisent pas d'effet biologique direct. Leur action se limite à une assistance externe à la mobilisation, sans modification des paramètres cliniques intrinsèques du patient.

Dans ce contexte, la notion de performance clinique, définie comme la capacité du dispositif à produire un effet médical direct sur l'état clinique ou la santé du patient, n'est pas applicable.

- Cf *PEC06 Sangle Plan d'évaluation clinique* et *REC06 Sangle Rapport d'évaluation clinique*

CONDITIONS D'UTILISATION PREVUES

Attachée à la tête de lit ou directement sur le sommier, elle permet de faciliter le rehaussement. Le fourreau se place au niveau du fessier et permet à l'aidant d'effectuer le geste du tir à la corde pour rehausser la personne, se préservant ainsi d'un effort.

UTILISATION



Passer la poignée autour d'un point fixe du lit et passer toute la sangle dans la poignée. Assurez-vous que le lit soit freiné s'il dispose de roues. Passer le fourreau de poulie sous ischion, placez vous en tête de lit. Vous pouvez demander au patient de saisir la potence de lit, ou simplement d'essayer de regarder ses pieds (levé de la tête hors du matelas), puis tirez sur la sangle pour rehausser le patient. Dégager la sangle après utilisation. Si vous souhaitez laisser la sangle installée, prenez garde de la stocker hors de portée du patient.

NOTICE DE MONTAGE ET DIMENSIONS

La sangle poulie ne nécessite pas de montage, elle est livrée assemblée.

Sangle : 240 x 3.8 cm
Fourreau : 60 x 10 cm
Poids de l'ensemble : 300g



MATERIAUX ET ENTRETIEN

MATERIAUX

Polypropylène, nylon enduction PVC, polyester, polyester enduction PVC, jersey polyester enduction PVC, Polyuréthane.

ENTRETIEN

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.

Pour la sangle : Lavage à 60° en machine. Séchage à l'air libre.

Pour le fourreau : Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (Essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air).

Compatible protocoles de bionettoyage et désinfection vapeur selon la norme NF T72-110 pour la désinfection à la vapeur (utilisation D-VAP PRISM).

STOCKAGE ET MISE AU REBUT

STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température. Eviter l'exposition au soleil.

MISE AU REBUT

Vérifiez la disponibilité d'options de recyclage respectueuses de l'environnement et appliquez les dispositions légales nationales en vigueur. L'élimination du dispositif doit être effectuée conformément à la réglementation applicable.

SECURITE

SPECIFICATIONS

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical ou un professionnel de santé qui vous donnera toutes les informations utiles



à l'utilisation en toute sécurité de notre produit. En cas d'évènement indésirable, consultez votre professionnel de santé.

Seuls les accessoires fournis par Alter Eco Santé sont compatibles avec nos dispositifs.

L'utilisation de nos produits avec tout autre aide technique ou dispositif médical, y compris de notre marque, doit être validé par un professionnel de santé pour assurer la sécurité du patient et du soignant.

CONTROLE PERIODIQUE

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualite@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

PRODUIT, ACCESSOIRES ET PIECES D'USURE

PRODUIT ET VARIANTES

RÉFÉRENCE	N° IDENTIFICATION UDI	POIDS	DESCRIPTION
S121680	03760311370915	300 G	Sangle POULIE® de rehaussement

Charge maximale admissible : 200 kg.

ACCESSOIRES

Seuls les accessoires Alter Eco Santé sont autorisés pour l'utilisation du dispositif.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
N/A	N/A

PIECES D'USURE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
N/A	N/A

Seules les pièces d'origine fournies par le fabricant assurent la conformité du produit, le niveau de service et la sécurité exigés par le concepteur.

GARANTIE

2 ans hors pièces d'usure (6 mois). Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect préconisations d'entretien du fabricant.